

Actimove, temblak kończyny górnej rozmiar XL, 1 szt.



Cena: 79,59 zł

Opis słownikowy

Marka	Actimove
Postać	temblak
Producent	Essity Poland
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Actimove, temblak kończyny górnej rozmiar XL, 1 szt.

Temblak kończyny górnej Actimove ogranicza obrót przedramienia poprzez pętlę na kciuk, ponadto wygodnie się dopasowuje wokół szyi, dzięki szerokiemu temblakowi. Rozmiar XL - długość przedramienia: >48 cm.

Działanie Actimove, temblak kończyny górnej rozmiar XL, 1 szt.

Łatwe zakładanie, regulacja i zdejmowanie przy użyciu jednej ręki dzięki paskom zapinanym na rzep oraz otwieranej i zamykanej kieszeni.

Wysoki komfort użytkowania, zmniejszony nacisk na szyję dzięki stabilnemu, wygodnemu pasowi o szerokości 5,5 cm zamiast oddzielnej podkładki ochronnej na szyję.

Wsparcie w łagodzeniu bólu przez stabilizację stawu barkowego i utrzymywanie zgiętego stawu łokciowego w kieszeni ograniczającej zakres ruchów.

Zabezpieczenie kończyny podczas użytkowania produktu: po umieszczeniu dłoni w temblaku z przełożeniem kciuka przez otwór możliwość obracania przedramieniem jest ograniczona, ale pozostałe palce zachowują pełną ruchomość.

Komfort użytkowania zapewnia oddychający materiał, z którego wykonano kieszeń.

Wygoda podczas badań kontrolnych, ponieważ nie ma konieczności zdejmowania produktu przed wykonaniem badań rentgenowskich.

Odpowiedni dla osób wrażliwych na lateks - produkt wytwarzany bez użycia lateksu naturalnego.

Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu higieny; możliwość prania w pralce w temperaturze 40°C.

Dostępny w czterech rozmiarach.

Wskazania Actimove, temblak kończyny górnej rozmiar XL, 1 szt.

Okres pooperacyjny (np. po uszkodzeniu stożka rotatorów)

Postępowanie w złamaniach (np., złamania obojczyka, łopatki, kości ramiennej i guzka większego kości ramiennej)

Skręcenia i zwichnięcia stawów (np. zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego i mostkowo-obojczykowego, wywichnięcie barku)

Choroby zapalne (np. wapniejące zapalenie ścięgien stożka rotatorów)

Niewielka niestabilność stawu barkowego (np. niestabilność grzbietowa)

Podparcie u pacjentów z porażeniem połowicznym

Podparcie podczas noszenia gipsu lub szyny ortopedycznej

Czasowa stabilizacja ramienia w medycynie ratunkowej

Informacje dodatkowe Actimove, temblak kończyny górnej rozmiar XL, 1 szt.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

