

# AND UA-611, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt Diagnosis



Cena: 105,96 zł

## Opis słownikowy

Marka	AND A&D Medical
Postać	ciśnieniomierz
Producent	Diagnosis
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Informacje podstawowe AND UA-611, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt Diagnosis

Wyrób medyczny przeznaczony do samodzielnego pomiaru ciśnienia krwi i tętna w warunkach domowych. Został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i precyzyjny pomiar i ułatwić codzienne pomiary ciśnienia krwi.

### Skład AND UA-611, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt Diagnosis

#### Zawartość opakowania

Ciśnieniomierz, mankiety M (22-32cm), instrukcja użycia, 4 x baterie AA.

### Działanie AND UA-611, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt Diagnosis

Ciśnieniomierz AND UA-611 to wyrób o klinicznie sprawdzonym algorytmie pomiarowym. Wbudowany w urządzenie czytelny, 3-liniowy wyświetlacz doceni osoby starsze i mające problemy ze wzrokiem. Produkt umożliwia wykrycie takich dysfunkcji serca jak nieregularny puls. Urządzenie umożliwia przechowywanie 30 ostatnich wyników.

Dokładność	ciężnienie: $\pm 3$ mmHg; tętno
Pamięć	ostatnich 30 wyników
Zasilanie	4 x 1,5V (R6P, LR6 lub AA)
Waga	około 230 g (bez baterii)
Wymiary	96 mm x 68 mm x 130 mm
Tryb pracy	ciągły

## Dawkowanie AND UA-611, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt Diagnosis

Założyć mankiety na ramieniu (najlepiej na lewym, na poziomie serca). Podczas pomiaru należy siedzieć spokojnie. Wcisnąć przycisk START. Zostaną wyświetlone wszystkie elementy wyświetlacza. Przez krótki moment będzie migać symbol „0”. Następnie dane na wyświetlaczu zmienią się i rozpoczyna się pomiar. Mankiet zacznie się napełniać. Uczucie uciskania jest normalne. Podczas napełniania zostanie wyświetlony pasek wskazujący ciśnienie. UWAGA: W celu zakończenia pompowania w dowolnym momencie należy ponownie wcisnąć przycisk START. Po zakończeniu pompowania rozpocznie się automatyczny spust powietrza, a znak będzie migać, wskazując, że pomiar jest w toku. Po wykryciu tętna, znak będzie migać z każdym uderzeniem serca. Uwaga: Jeżeli nie zostanie osiągnięte prawidłowe ciśnienie, urządzenie automatycznie rozpocznie ponowne pompowanie. Po zakończeniu pomiaru, wyświetlone zostaną wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz wartość tętna. Mankiet wypompowuje pozostałe powietrze do całkowitego opróżnienia. Aby wyłączyć urządzenie należy ponownie wcisnąć przycisk START.

## Informacje dodatkowe AND UA-611, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt Diagnosis

### Przeciwwskazania i środki ostrożności

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia wyrobu.  
Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.  
Chronić przed uszkodzeniem w wyniku upadku.  
Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci.  
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

### Uwagi i środki ostrożności

Zmierzone wartości mają wyłącznie charakter informacyjny. Pomiar ciśnienia nie zastępuje badania lekarskiego! Po zmierzeniu ciśnienia należy zasięgnąć porady lekarskiej. Na podstawie pomiaru w żadnym wypadku nie wolno samodzielnie podejmować decyzji medycznych (np. dotyczących stosowania leków i ich dawkowania)!

### Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u noworodków ani dzieci.