

AND UA-651, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt. + zasilacz GRATIS

Cena: 139,98 zł

Opis słownikowy

Marka	AND A&D Medical
Postać	ciśnieniomierz
Producent	Diagnosis
Rejestracja	Wyrób medyczny



Opis produktu

Informacje podstawowe AND UA-651, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt. + zasilacz GRATIS

Naramienny ciśnieniomierz automatyczny AND UA-651 z zasilaczem pozwala na wygodny, prosty pomiar ciśnienia i tętna za pomocą jednego przycisku. Czytelny, 3-liniowy wyświetlacz gwarantuje łatwość odczytu wyniku dokonywanego z pomocą sprawdzonego klinicznie algorytmu pomiarowego. Dzięki zapisywaniu ostatnich 30 pomiarów w pamięci urządzenia, możliwa jest łatwiejsza kontrola wyników w czasie. Produkt wyposażony jest w komfortowy mankiet na ramię SlimFit w rozmiarze M (22-32 cm). Posiada również Wskaźnik Klasyfikacji Ciśnienia Krwi, pozwalający na automatyczną identyfikację wyniku wg klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Skład AND UA-651, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt. + zasilacz GRATIS

Zawartość opakowania

Zasilacz,
ciśnieniomierz,
mankiet,
baterie AA.

Działanie AND UA-651, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt. + zasilacz GRATIS

Ciśnieniomierz do użytku domowego i profesjonalnego, z klinicznie sprawdzonym algorytmem pomiarowym, czytelnym, 3-liniowym wyświetlaczem i pamięcią ostatnich 30 ostatnich pomiarów.

Za pomocą jednego przycisku dokonuje dokładnego pomiaru ciśnienia krwi (także przy nieregularnym pulsie IHB) i klasyfikuje wynik zgodnie ze Wskaźnikiem Klasyfikacji Ciśnienia Krwi wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Urządzenie wyposażone w komfortowy mankiet SlimFit M (22-32 cm).

metoda pomiaru - pomiar oscylometryczny

zakres pomiaru ciśnienie: 0-299mmHg, skurczowe 60-279mmHg, rozkurczowe 40-200mm

dokładność pomiaru: ciśnienie: ± 3 mmHg, tętno: $\pm 5\%$

nieregularny puls: dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie IHB

test kliniczny: zgodnie z ANSI / AAMI SP-10 1992

mankiet: SlimFit (latex FREE, metal FREE) 22-32 cm

zasilanie: 4 baterie 1,5 V (R6P, LR6 lub AA) lub zasilacz

waga: ok. 240 g, bez baterii

wymiary: ok. 96 x 68 x 130 mm

warunki pracy: 10-40 °C / 15-85 % RH / 800-1060 hPa

transport i przechowywanie: -20-60 °C / 10-95 % RH

identyfikacja wyniku: automatyczna identyfikacja wyniku wg klasyfikacji WHO

pamięć 30 pomiarów

wskazuje średni wynik ze wszystkich pomiarów

Wskazania AND UA-651, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt. + zasilacz GRATIS

Ciśnieniomierz AND UA-651 służy do pomiaru ciśnienia krwi oraz tętna (nawet wtedy, gdy tętno jest nieregularne).

Dawkowanie AND UA-651, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt. + zasilacz GRATIS

Upewnij się, że urządzenie jest czyste.

Usiądź wygodnie i załóż mankiet na ramię wg instrukcji.

Naciśnij przycisk „start”.

Poczekaj, aż urządzenie wykona pomiar i odczytaj wynik na wyświetlaczu urządzenia.

Wyłącz urządzenie naciskając przycisk „start” ponownie.

Informacje dodatkowe AND UA-651, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt. + zasilacz GRATIS

Produkt posiada 5 lat gwarancji od drzwi do drzwi.

Osoby z poważnymi problemami z krążeniem w ręku powinny przed skorzystaniem z urządzenia skontaktować się z lekarzem, by uniknąć niebezpieczeństw natury medycznej.

Nie powinno się ignorować wyników wskazujących na zaburzenia rytmu serca, mogą być one objawem poważnych chorób układu sercowo-naczyniowego albo innych schorzeń ogólnoustrojowych.

Nie powinno się samodzielnie interpretować wyników pomiarów i rozpoczynać bądź modyfikować leczenia. Przed podjęciem podobnych akcji należy zawsze skonsultować wyniki z lekarzem.

Nie należy zakładać mankietu na zranione i niezagojone ramię, ani na ramię z założonym wlewem dożylnym lub do transfuzji krwi.

Nie można używać urządzenia w miejscu, w którym mogą występować gazy palne (takie jak gaz anestetyczny) – może to spowodować eksplozję.

Nie można używać urządzenia w środowisku o wysokim stężeniu tlenu (takim jak wysokociśnieniowa komora tlenowa lub namiot

tlenowy) – może to spowodować pożar lub eksplozję.

Galeria

