

BabyCap, aspirator do nosa dla niemowląt od 1 dnia życia, 1 szt.

Cena: 15,79 zł



Opis słownikowy

Marka	Babycap
Postać	aspirator
Producent	Capeypharma
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe BabyCap, aspirator do nosa dla niemowląt od 1 dnia życia, 1 szt.

BabyCap, aspirator do nosa, od 1 dnia życia umożliwia aspirację wydzieliny zatykającej nos dziecka. Anatomiczny kształt końcówki wykonanej z nietłukącego się tworzywa sprawia, że cały proces jest bezpieczny. Po użyciu końcówka może być poddana zimnej lub parowej sterylizacji. Aspirator jest przeznaczony do wielokrotnego użytku.

Skład BabyCap, aspirator do nosa dla niemowląt od 1 dnia życia, 1 szt.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Aplikator do nosa
Zbiornik
Nasadka na wężyk
Wężyk
Ustnik

Wskazania BabyCap, aspirator do nosa dla niemowląt od 1 dnia życia, 1 szt.

Udrażnianie dróg oddechowych u dzieci, już od pierwszego dnia życia.

Dawkowanie BabyCap, aspirator do nosa dla niemowląt od 1 dnia życia, 1 szt.

Przed pierwszym użyciem:

Należy rozebrać aspirator na części i starannie umyć każdą z nich w gorącej wodzie z mydłem, a następnie dokładnie wypłukać w czystej wodzie. Sterylizować aplikator na zimno lub przy użyciu pary wodnej.

Dla uzyskania maksymalnej higieny, przed każdym użyciem, sterylizować aplikator na zimno lub przy użyciu pary wodnej.

Umyć ręce.

Złożyć aspirator zgodnie ze schematem.

Umieścić mały kawałek waty, który posłuży za filtr między aplikatorem do nosa a zbiornikiem.

Położyć dziecko na stoliku do przewijania i podnieść jego głowę.

Wziąć ustnik do ust. Mała otoczka ułatwia trzymanie go między zębami.

Przyłożyć aplikator do otworów nosowych dziecka.

Delikatnie wciągnąć powietrze. Aspirowane wydzieliny będą gromadzić się w zbiorniku.

W razie potrzeby, czynność powtarzać.

W celu ułatwienia aspiracji wydzieliny do każdego otworu nosowego można zakropić wodę morską.

Informacje dodatkowe BabyCap, aspirator do nosa dla niemowląt od 1 dnia życia, 1 szt.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie gotować.