

Blend-a-dent Complete Extra Stark Fresh, klej mocujący do protez smak miętowy, 47 g

Cena: 22,49 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|------------------|
| Marka | Blend-A-Dent |
| Producent | Procter & Gamble |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |



Opis produktu

Informacje podstawowe Blend-a-dent Complete Extra Stark Fresh, klej mocujący do protez smak miętowy, 47 g

Blend-a-dent Complete Extra Stark to wyrób medyczny o świeżym miętowym zapachu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Blend-a-dent Complete Extra Stark Fresh, klej mocujący do protez smak miętowy, 47 g

Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer, Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum, Petrolatum, Silica, Menthyl Lactate, CI 14720, Aroma, Menthol, CI 16185, Limonene.

Działanie Blend-a-dent Complete Extra Stark Fresh, klej mocujący do protez smak miętowy, 47 g

Klej do protez Blend-a-dent Complete Extra Stark gwarantuje silne umocowanie protezy, zwiększenie komfortu użytkowania oraz zabezpieczenie przed przedostawaniem się cząsteczek pokarmu.

Wskazania Blend-a-dent Complete Extra Stark Fresh, klej mocujący do protez smak miętowy, 47 g

Wyrób medyczny Blend-a-dent Complete Extra Stark przeznaczony jest do pełnych i częściowych protez zębowych.

Dawkowanie Blend-a-dent Complete Extra Stark Fresh, klej mocujący do protez smak miętowy, 47 g

Sposób użycia wyrobu medycznego

1. Wyczyścić i osuszyć protezę., dokładnie oczyścić dziąsła.
2. Nałożyć klej punktowo wzdłuż krawędzi i na powierzchni protezy.
3. Jamę ustną przepłucz wodą.
4. Włóż protezę i dociśnij przez chwilę.
5. Odczekaj 15-30 minut przed ponownym jedzeniem i piciem.

Informacje dodatkowe Blend-a-dent Complete Extra Stark Fresh, klej mocujący do protez smak miętowy, 47 g

Nie używać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Galeria

