

# Blend-a-dent Plus Dual Power, klej mocujący do protez, 40 g

Cena: 23,89 zł



## Opis słownikowy

Marka	Blend-A-Dent
Producent	Procter & Gamble
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Blend-a-dent Plus Dual Power, klej mocujący do protez, 40 g

Wyrób medyczny Blend-a-dent Plus Dual Power to wysokiej jakości klej do protez.

### Skład Blend-a-dent Plus Dual Power, klej mocujący do protez, 40 g

Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer, Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum, Petrolatum, Silica, CI 45410.

### Działanie Blend-a-dent Plus Dual Power, klej mocujący do protez, 40 g

Wyrób medyczny Blend-a-dent Plus Dual Power zapewnia solidne umocowanie protezy, które utrzymuje ją na miejscu przez cały dzień. Dzięki warstwie amortyzującej między dziąsłami a protezą, zapewnia indywidualne dopasowanie oraz zabezpieczenie przed przedostawaniem się drobinek pokarmów. Bezsmakowa formuła nie wpływa na smak potraw.

### Wskazania Blend-a-dent Plus Dual Power, klej mocujący do protez, 40 g

Blend-a-dent Plus Dual Power przeznaczony jest do pełnych i częściowych protez zębowych.

## Dawkowanie Blend-a-dent Plus Dual Power, klej mocujący do protez, 40 g

Wyczyść i osusz protezę, dokładnie oczyść dziąsła.  
Nałóż klej punktowo wzdłuż krawędzi i na powierzchni protezy.  
Jamę ustną przepłucz wodą.  
Włóż protezę i dociśnij przez chwilę.  
Oczekaj 15-30 minut przed ponownym jedzeniem i piciem.

## Informacje dodatkowe Blend-a-dent Plus Dual Power, klej mocujący do protez, 40 g

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.  
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.