

Bobo-Test EZ HCG, test ciążowy płytkowy, 1 szt

Cena: 5,10 zł



Opis słownikowy

Postać	test
Producent	Diagnosis
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Bobo-Test EZ HCG, test ciążowy płytkowy, 1 szt

BOBO - TEST płytkowy - to szybki i łatwy do przeprowadzenia test ciążowy do domowego użytku.

Wyniki testu pojawiają się w ciągu 3-5 minut po jego wykonaniu.

Test można stosować już po 10 dniach po stosunku.

Jeśli nie minął jeszcze pierwszy dzień spodziewanej miesiączki do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu.

Jeżeli minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki test można przeprowadzić o każdej porze dnia.

Skład Bobo-Test EZ HCG, test ciążowy płytkowy, 1 szt

Zawartość opakowania: instrukcja użycia, płytka testowa, pipetka.

Działanie Bobo-Test EZ HCG, test ciążowy płytkowy, 1 szt

Wkrótce po zapłodnieniu, komórki rozwijającego się łożyska wytwarzają hormon HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa). Bobo Test wykrywa w moczu nawet niewielkie ilości hormonu HCG co może stwierdzić ciążę lub jej brak.

Bobo Test jest wyjątkowo czuły i jest w stanie wykryć obecność HCG już przy stężeniu 25 mIU/ml.

Dawkowanie Bobo-Test EZ HCG, test ciążowy płytkowy, 1 szt

Zanim przeprowadzisz test zberz próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika ze szkła lub plastiku.

Wyjmij foliową torebkę z opakowania testu.

Rozerwij torebkę wzdłuż nacięcia i wyjmij płytkę testową i pipetkę.

Zanurz końcówkę pipetki w pojemniku z próbką moczu.

Ściskając szeroką część pipetki nabierz próbkę moczu.

Trzymając pipetkę z próbką moczu pionowo nad okienkiem SAMPLE (S) umieść w nim 3-4 krople moczu. Uważaj, aby nie wytworzyły się pęcherzyki powietrza.

Po 3-5 minutach odczytaj wynik, a następnie wyrzuć test.