

Corega Power Max Mocowanie + Komfort, krem mocujący do protez neutralny, 40 g



Cena: 16,54 zł

Opis słownikowy

Marka	Corega
Postać	krem
Producent	Glaxosmithkline
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Corega Power Max Mocowanie + Komfort, krem mocujący do protez neutralny, 40 g

Wyrób medyczny w postaci kremu mocującego do protez o neutralnym smaku. Produkt przytwierdza protezę nawet do 12 godzin. Neutralny smak został stworzony z myślą o osobach, które nie lubią aromatu mięty.

Działanie Corega Power Max Mocowanie + Komfort, krem mocujący do protez neutralny, 40 g

Preparat zapewnia mocowanie protezy, utrzymując ją w odpowiednim miejscu nawet do 12 godzin. Precyzyjna końcówka pozwala na aplikację odpowiedniej ilości produktu. Krem pozwala zadbać o komfort dziąseł. Chroni je przed przesadnym naciskiem, tarciem oraz podrażnieniami.

Dawkowanie Corega Power Max Mocowanie + Komfort, krem mocujący do protez neutralny, 40 g

Sposób aplikacji kremu:

Protezę należy umyć i wysuszyć.

Nanieść krótkie paski kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi.

Proteza górna: Nałożyć długim pojedynczym paskiem. Nałożyć 2 krótsze paski na środku protezy.

Proteza dolna: Produkt nakładać długim ciągłym paskiem.

Proteza częściowa: Nałożyć 2 krótkie paski.

Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.

Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego trzymania.

Informacje dodatkowe Corega Power Max Mocowanie + Komfort, krem mocujący do protez neutralny, 40 g

Przed zastosowaniem kremu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Tylko do użytku zewnętrznego.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.