

Corega Power Max Mocowanie + Świeżość, miętowy krem mocujący do protez, 40 g



Cena: 15,34 zł

Opis słownikowy

Marka	Corega
Postać	krem
Producent	Glaxosmithkline
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Corega Power Max Mocowanie + Świeżość, miętowy krem mocujący do protez, 40 g

Corega Max Mocowanie + Świeżość to krem mocujący do protez, gwarantujący stabilne mocowanie do 12 godzin oraz długotrwałą świeżość. Krem posiada przyjemny, intensywnie miętowy smak, który odświeża oddech na cały dzień.

Skład Corega Power Max Mocowanie + Świeżość, miętowy krem mocujący do protez, 40 g

Kopolimer wapniowo-sodowy PVM / MA, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna, aromat, alkohol benzylowy.

Działanie Corega Power Max Mocowanie + Świeżość, miętowy krem mocujący do protez, 40 g

Formuła wyrobu medycznego Corega Power Max Mocowanie + Świeżość dodatkowo pomaga chronić dziąsła przed naciskiem protezy, tarcieniem oraz podrażnieniami, co znacząco podnosi codzienną wygodę jej noszenia. Krem doskonale uszczelnia protezę i stanowi osłonę dla dziąseł i podniebienia przed drażniącym działaniem resztek pokarmu, które mogą odstawać się pod powierzchnią protezy w przypadku jej niewłaściwego dopasowania. Podwójnie miętowy smak pozwoli cieszyć się uczuciem świeżości na długo.

Dawkowanie Corega Power Max Mocowanie + Świeżość, miętowy krem mocujący do protez, 40 g

Przed aplikacją kremu do mocowania protezę należy umyć i wysuszyć.
Nanosić krótkie paski kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi.
Proteza górna: nakładać dwoma krótszymi paskami na środku.
Proteza dolna: produkt nakładać długim ciągłym paskiem.
Proteza częściowa: nałożyć dwa krótkie paski.
Przed założeniem protezy wypłukać jamę ustną.
Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego trzymania.
Po użyciu zamknąć opakowanie zakrętką.
Końcówka tubki i nakrętka powinny być zawsze suche, aby nie spowodować zatkania tubki.

Informacje dodatkowe Corega Power Max Mocowanie + Świeżość, miętowy krem mocujący do protez, 40 g

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na produkt Corega Power Max, krem do protez, Mocowanie + Świeżość. W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie produktu.
Mogą wystąpić również inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej i objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności).
Przy prawidłowym stosowaniu produktu może dojść do połknięcia niewielkich ilości kremu (nie jest to szkodliwe).
Niewłaściwie dopasowane protezy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie (należy kontrolować dopasowanie protez podczas regularnych wizyt u lekarza dentysty).