

Corega Super Mocny, krem do protez delikatnie miętowy, 70 g

Cena: 18,39 zł



Opis słownikowy

Marka	Corega
Postać	krem
Producent	Glaxosmithkline
Rejestracja	Wyrób medyczny

Super Mocny
Delikatnie Miętowy **70g**

Opis produktu

Informacje podstawowe Corega Super Mocny, krem do protez delikatnie miętowy, 70 g

Mocuje protezę w 3 kierunkach i utrzymuje ją cały dzień we właściwym miejscu.
Zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod protezę.
Działa do 12 godzin.
Ergonomiczne opakowanie XL
Posiada przyjemny delikatnie miętowy smak.
Nie zawiera cynku.

Skład Corega Super Mocny, krem do protez delikatnie miętowy, 70 g

calcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, propylparaben, aroma, CI 45430.

Wskazania Corega Super Mocny, krem do protez delikatnie miętowy, 70 g

Krem do protez Corega Super Mocny stosuje się zarówno do protez zębowych całkowitych, jak i częściowych.

Dawkowanie Corega Super Mocny, krem do protez delikatnie miętowy, 70 g

Sposób aplikacji kremu:

Protezę należy umyć i wysuszyć.

Nanosić krótkie paski kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi.

Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.

Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund.

Sposób usuwania:

Przepłukać jamę ustną wodą.

Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.

Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.

Dokładnie oczyścić protezę stosując tabletki do czyszczenia protez Corega, a następnie opłukać wodą.

Informacje dodatkowe Corega Super Mocny, krem do protez delikatnie miętowy, 70 g

Przechowywać w temperaturze maksymalnej 30oC.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Galeria

