

## Criorectum Protect, czopki przeciw hemoroidom, 10 szt.

Cena: 27,99 zł



### Opis słownikowy

Postać	czopki
Producent	Abrh Plus
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Criorectum Protect, czopki przeciw hemoroidom, 10 szt.

- Wyrób medyczny.
- To unikalna formuła dwufazowych czopków krioterapeutycznych przeznaczona do miejscowego leczenia hemoroidów, w każdym stopniu zaawansowania choroby, a także w uszkodzeniach błony śluzowej odbytnicy.
- Wygodny w aplikacji czopek początkowo oddaje na tkankę niską temperaturę, co usmierza ból, likwiduje krwawienie i obrzęk. Po rozpuszczeniu się czopka, macierz polimerowa tworzy film, który stanowi barierę dla mikroorganizmów spowalniających procesy gojenia ran.

### Skład Criorectum Protect, czopki przeciw hemoroidom, 10 szt.

woda, polimer VIVAPUR MCG 811P.

### Działanie Criorectum Protect, czopki przeciw hemoroidom, 10 szt.

- aplikacja niskiej temperatury usmierza ból, likwiduje krwawienia i obrzęki.
- macierz polimerowa tworzy film, co przyspiesza procesy gojenia ostrych i przewlekłych ran oraz uszkodzeń skóry odbytu i błony śluzowej odbytnicy.
- nie wykazują działania farmakologicznego, immunologicznego i metabolicznego na organizm ludzki.
- nie wchłaniają się i są w pełni obojętne, dlatego mogą być stosowane przez alergików i kobiety w ciąży.

### Wskazania Criorectum Protect, czopki przeciw hemoroidom, 10 szt.

- hemoroidów i dolegliwości takich jak: pieczenie, swędzenie, kłucie, obrzęk, krwawienie, ból,
- bolesnych pęknięć skóry w okolicach odbytu,
- uszkodzenia błony śluzowej odbytnicy,
- zabiegów chirurgicznych okolic odbytu.

### **Dawkowanie Criorectum Protect, czopki przeciw hemoroidom, 10 szt.**

- Przed zastosowaniem czopki należy zamrozić w zamrażalniku lodówki w temp. -10 do - 25 stopni Celsjusza. Czas zamrażania min. 1 godzina.
- Stosować doodbytniczo, niezwłocznie po wyciągnięciu z zamrażalnika, 1 czopek 2 razy dziennie.
- W przypadku odczuwania intensywnych objawów stosować przez okres 5 dni. Utrzymujące się dolegliwości lub ich nawrót są wskazaniem do wydłużenia kuracji o kolejne 5 dni.
- Bliстер z czopkami przed zamrożeniem należy wstrząsnąć, aby upłynnić masę polimerową, a następnie zamrozić w pozycji pionowej, ostrzem czopka do dołu.

### **Przeciwwskazania Criorectum Protect, czopki przeciw hemoroidom, 10 szt.**

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Przed zastosowaniem czopki umieścić w lodówce na minimum 1 godzinę.

### **Informacje dodatkowe Criorectum Protect, czopki przeciw hemoroidom, 10 szt.**

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego:

Bezpośrednio po aplikacji może wystąpić nieznaczny dyskomfort, związany z aplikacją zamrożonego czopka. Odczucie mija po kilkunastu sekundach.