

## Diagnostic DM-300 IHB, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt. + zasilacz GRATIS

Cena: 89,69 zł



### Opis słownikowy

Marka	Diagnostic
Postać	ciśnieniomierz
Producent	Diagnosis
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Diagnostic DM-300 IHB, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt. + zasilacz GRATIS

Ciśnieniomierz automatyczny DM-300 IHB, naramienny – wyrób medyczny, który pozwala na monitorowanie tętna oraz ciśnienia tętniczego krwi u osób dorosłych na ramieniu. Kontrolowanie tych parametrów może pomóc wykryć nadciśnienie, które może stać się przyczyną zawału lub udaru. Urządzenie posiada wskaźnik klasyfikacji nadciśnienia wg. wytycznych WHO, a także funkcję wykrywania nieregularnej pracy serca.

## Skład Diagnostic DM-300 IHB, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt. + zasilacz GRATIS

Zestaw zawiera:

ciśnieniomierz automatyczny,  
mankiet w rozmiarze M (22-36 cm),  
4 sztuki baterii typu AA,  
etui,  
instrukcję użycia i gwarancję.  
zasilacz

## **Działanie Diagnostic DM-300 IHB, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt. + zasilacz GRATIS**

Wyrób medyczny należy stosować w celu pomiaru pulsu oraz ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi. Urządzenie wykorzystuje metodę oscylometryczną do oznaczenia siły, z jaką krew naciska na tętnice.

### **Cechy produktu**

czytelny, 3-liniowy wyświetlacz,  
pomiar dokonywany jednym przyciskiem,  
dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie IHB,  
wskaźnik Klasyfikacji Ciśnienia Krwi wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),  
zapamiętuje 30 pomiarów dla 4 użytkowników,  
łatwy w użyciu mankiety na ramię M (22-36 cm), (opcjonalnie) L (32-42 cm),  
zasilane bateryjne, możliwość pracy z zasilaczem sieciowym (opcjonalnie),  
automatyczny wyłącznik po 3 minutach,  
sygnalizacja słabej baterii.

## **Wskazania Diagnostic DM-300 IHB, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt. + zasilacz GRATIS**

Ciśnieniomierz przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu.

## **Dawkowanie Diagnostic DM-300 IHB, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt. + zasilacz GRATIS**

Założ mankiety około 1-2 cm nad stawem łokciowym. Dla najlepszych rezultatów załóż mankiety na nagie ramię, na poziomie serca.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Najpierw następuje pompowanie do ciśnienia początkowego. Jeżeli ciśnienie skurczowe bieżącego użytkownika jest większe niż 190 mmHg, urządzenie automatycznie zmieni napełnienie do odpowiedniego poziomu.

Po napompowaniu mankiety powietrze będzie powoli spuszczone, zgodnie ze wskazaniem ciśnieniomierza. Jednocześnie na ekranie będzie migać symbol serca, sygnalizując bicie serca.

Po zakończeniu pomiaru usłyszemy trzy krótkie sygnały dźwiękowe.

Na ekranie wyświetlą się wartości pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

Z lewej strony ekranu pojawi się wskaźnik ciśnienia krwi według klasyfikacji WHO.

Przyciskiem wyłącz urządzenie w dowolnym trybie lub pozostaw, a ciśnieniomierz wyłączy się samoczynnie po około 3 minutach bezczynności.

## **Informacje dodatkowe Diagnostic DM-300 IHB, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt. + zasilacz GRATIS**

Wyrobu nie należy pozostawić bez nadzoru.

Przechowuj wyrób w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Urządzenie zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte.

Pomiary ciśnienia krwi powinny być interpretowane wyłącznie przez pracownika służby zdrowia, który zna historię medyczną pacjenta.

Unika skrajnych temperatur.

Nie wystawia urządzenia bezpośrednio na światło słoneczne.