

Diagnostic Nano, inhalator kompresorowy tłokowy, 1 szt.

Cena: 89,08 zł



Opis słownikowy

Marka	Diagnostic
Postać	inhalator
Producent	Diagnosis
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Diagnostic Nano, inhalator kompresorowy tłokowy, 1 szt.

Wyrób medyczny Diagnostic NANO to inhalator kompresorowy tłokowy umożliwiający dostarczenie leku w formie aerozolu do dolnych dróg oddechowych pacjenta.

Skład Diagnostic Nano, inhalator kompresorowy tłokowy, 1 szt.

Zawartość opakowania

- 1 x kompresor
- 1 x maska dla dorosłych,
- 1 x maska dla dzieci,
- 1 x rozpylacz,
- 1 x przewód powietrza,
- 1 x ustnik,
- 5 x filtr powietrza.

Działanie Diagnostic Nano, inhalator kompresorowy tłokowy, 1 szt.

Produkt wytwarza strumień powietrza, który prowadzony do nebulizatora umożliwia rozpylenie znajdującego się w nim leku do postaci łatwej do inhalacji mgiełki.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy przerywanej (30 minut pracy, 30 minut przerwy).
Zbiornik na lek może pomieścić jednorazowo nie więcej niż 8 ml płynu.

Wskazania Diagnostic Nano, inhalator kompresorowy tłokowy, 1 szt.

Inhalator Diagnostic NANO został opracowany do leczenia astmy, alergii i innych chorób układu oddechowego.

Dawkowanie Diagnostic Nano, inhalator kompresorowy tłokowy, 1 szt.

1. Wlej lek do nebulizatora w ilości zaleconej przez lekarza.
2. Podłącz ustnik lub maskę.
3. Podłącz wtyczkę inhalatora do prądu.
4. Upewnij się, że filtr powietrza jest czysty i znajduje się w inhalatorze.
5. Podłącz przewód powietrzny do nebulizatora i do inhalatora.
6. Włącz zasilanie i rozpocznij inhalację.
7. W momencie opróżnienia pojemnika na lek zakończ inhalację.
8. Wyłącz inhalator, odłącz przewód powietrzny.
9. Wyczyść urządzenie i akcesoria zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

Przeciwwskazania Diagnostic Nano, inhalator kompresorowy tłokowy, 1 szt.

Nie używaj urządzenia jeśli wydaje ono dziwne dźwięki.
Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacji.
Nie należy inhalować pacjentów nieprzytomnych i bez spontanicznej czynności oddechowej. Urządzenie nie jest przeznaczone do znieczulenia ani wentylowania płuc.
Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania olejków eterycznych, produktów na bazie olejów, płynów zawierających tłuste lub zawieszane cząsteczki.

Informacje dodatkowe Diagnostic Nano, inhalator kompresorowy tłokowy, 1 szt.

Filtr powietrza należy zmieniać jeżeli zmieni barwę na brązową, był używany przez 3 miesiące lub przeprowadzono 300 inhalacji.

Zaleca się wymianę pojemnika na lek co 12 miesięcy (co 6 jeżeli inhalacje są prowadzone 3 razy dziennie), maski, ustnik oraz przewód powietrzny zaleca się wymieniać co 2 lata lub niezwłocznie po zaobserwowaniu uszkodzenia.

Przechowywać w warunkach pokojowych, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dane techniczne:

Wydajność nebulizacji	0,4 ml/min
Rozmiar cząsteczek	0,5 - 6 µm

Wskaźnik MMAD	2,44 μm
Ilość osadu	0,15 ml
Przepływ nebulizatora	6 l
Przepływ kompresora	2-8 l
Poziom hałasu	poniżej 72 dBA
Wymiary	167 x 142 x 93 mm
Waga	1,51 kg
Gwarancja	2 lata od daty zakupu

Galeria

