


## Diclotica Thermal, uniwersalny duży plaster rozgrzewający rozmiar L, 50 szt.

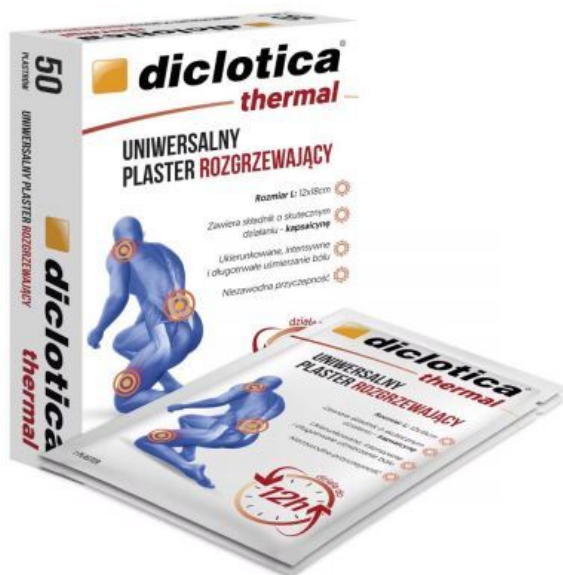

Cena: 97,48 zł

### Opis słownikowy

Marka	Diclotica
Postać	plastry
Producent	NEOTAC PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Kapsaicyna

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Diclotica Thermal, uniwersalny duży plaster rozgrzewający rozmiar L, 50 szt.

Diclotica® thermal uniwersalny plaster rozgrzewający Rozmiar L: 12x18 cm Zawiera składnik o skutecznym działaniu - kapsaicynę Ukierunkowane, intensywne i długotrwałe uśmierzanie bólu Niezawodna przyczepność Działa do 12h

## Skład Diclotica Thermal, uniwersalny duży plaster rozgrzewający rozmiar L, 50 szt.

### Składniki aktywne:

wyciąg z papryki, mentol, salicylan metylu.

## Działanie Diclotica Thermal, uniwersalny duży plaster rozgrzewający rozmiar L, 50 szt.

Plaster rozgrzewający Diclotica Thermal to wyrób medyczny o działaniu przeciwbólowym do stosowania miejscowego.

## Wskazania Diclotica Thermal, uniwersalny duży plaster rozgrzewający rozmiar L, 50 szt.

Uniwersalne plastry rozgrzewające Diclotica Thermal są przeznaczone dla osób dorosłych w celu długotrwałego łagodzenia:

bóli mięśniowych,  
zmęczenia mięśni,  
lumbago,  
ból pleców,  
sztywności barków,  
ból związanych z zapaleniem stawów.

## **Dawkowanie Diclotica Thermal, uniwersalny duży plaster rozgrzewający rozmiar L, 50 szt.**

Umyć i osuszyć bolące miejsce.

Rozciąć opakowanie i wyjąć plaster.

W razie potrzeby przyciąć plaster do odpowiedniego rozmiaru.

Odkleić papierową warstwę ochronną i przykleić plaster na bolące miejsce, raz lub dwa razy dziennie.

Każdy plaster można używać przez 8-12 godzin.

## **Przeciwwskazania Diclotica Thermal, uniwersalny duży plaster rozgrzewający rozmiar L, 50 szt.**

Nie stosować wyrobu:

- Na rany.
- Na podrażnioną lub uszkodzoną skórę.
- Jeśli wygląd produktu uległ zmianie.
- Przez okres dłuższy niż 12 godzin.
- W przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na produkt.

## **Informacje dodatkowe Diclotica Thermal, uniwersalny duży plaster rozgrzewający rozmiar L, 50 szt.**

### **Podczas stosowania wyrobu:**

- Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
- Nie należy mocno owijać bandażem bolącego miejsca.
- Należy nadzorować używanie wyrobu u dzieci.
- Zachować ostrożność w przypadku skłonności do reakcji alergicznych.

### **Przerwać używanie wyrobu i skonsultować się z lekarzem, jeśli:**

- Stan pogarsza się.
- Objawy utrzymują się przez okres dłuższy niż 7 dni.
- Objawy ustąpią i pojawią się ponownie w ciągu kilku dni.
- Wystąpi nadmierne podrażnienie skóry.
- W przypadku stosowania w bólu związanym z zapaleniem stawów: ból utrzymuje się dłużej niż 10 dni; występuje zaczerwienienie; u dzieci poniżej 12 roku życia.

### **Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:**

- Użytkownik jest kobietą w ciąży, kobietą karmiącą, osobą starszą i niedołążną.
- Użytkownik przyjmuje inne leki.

**Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci:**

W przypadku połknięcia, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską lub skontaktować się z Ośrodkiem Kontroli Zatruc.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu. Wyrób medyczny do jednorazowego użytku.