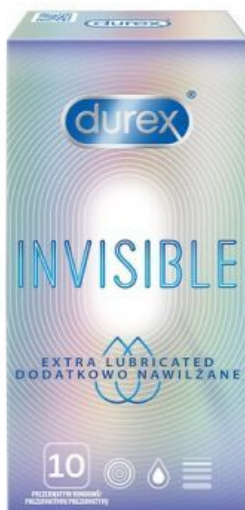


## Durex Invisible, supercienkie prezerwatywy dla większej bliskości, 10 szt.

**DODATKOWO NAWILŻANE  
PREZERWATYWY DUREX****10  
SZTUK**

Cena: 58,99 zł

### Opis słownikowy

Marka	Durex
Postać	prezerwatywy
Producent	Reckitt Benckiser
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Durex Invisible, supercienkie prezerwatywy dla większej bliskości, 10 szt.

Prezerwatywy Durex Invisible są super cienkie, o prostych ściankach, zakończone zbiorniczkiem. Przezroczyste i nawilżane prezerwatywy z naturalnej gumy lateksowej. Szerokość nominalna: 52 mm. Prezerwatywy Durex Invisible zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować bliskość przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony.

#### Skład Durex Invisible, supercienkie prezerwatywy dla większej bliskości, 10 szt.

Wykonane z naturalnej gumy lateksowej.

#### Działanie Durex Invisible, supercienkie prezerwatywy dla większej bliskości, 10 szt.

Wyrób medyczny Durex Invisible dla większej bliskości są 35% cieńsze od standardowych prezerwatyw Durex dla zwiększonego odczuwania i bliższego kontaktu z partnerem. Jest to najcieńsza, lateksowa prezerwatywa Durex. Pomaga zapobiegać ciąży i możliwości zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową.

#### Wskazania Durex Invisible, supercienkie prezerwatywy dla większej bliskości, 10 szt.

Antykoncepcja dla mężczyzn.

## Dawkowanie Durex Invisible, supercienkie prezerwatywy dla większej bliskości, 10 szt.

### Krok 1

Przed otwarciem opakowania foliowego przesunąć umieszczoną wewnątrz prezerwatywę, aby jej nie uszkodzić przy rozrywaniu opakowania.

Opakowanie foliowe otwierać delikatnie, nie używając ostrych narzędzi. Prezerwatywę wyjmować ostrożnie, by nie spowodować jej uszkodzenia np. paznokciem, biżuterią itp.

### Krok 2

Prezerwatywę należy założyć na penisa w stanie erekcji, przed jakimkolwiek kontaktem narządów płciowych partnerów. Tylko prawidłowe założenie pomoże uniknąć niepożądanego ciąży i zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Prezerwatywę należy umieścić na czubku penisa, rulonikiem na zewnątrz.

### Krok 3

Kciukiem i palcem wskazującym jednej ręki należy chwycić zbiorniczek prezerwatywy w taki sposób, aby zapobiec dostaniu się powietrza do jej wnętrza – pozostawienie powietrza w prezerwatywie może spowodować jej pęknięcie. Drugą ręką nałożyć prezerwatywę na członka w stanie wzwodu.

Prezerwatywa nie powinna ściśle przylegać do szczytu członka – należy pozostawić do 2 cm wolnego miejsca, a następnie rozwinąć rulonik aż do nasady penisa.

### Krok 4

Bezpośrednio po wytrysku nasienia ostrożnie wycofać penisa, przytrzymując mocno prezerwatywę przy jego nasadzie. Po stosunku należy unikać kontaktu z pochwą zarówno zużytej prezerwatywy jak i penisa, aby nie dopuścić do przedostania się spermy. Zużyta prezerwatywę należy zawinąć w papier i wyrzucić do śmieci (nie do toalety).

## Przeciwwskazania Durex Invisible, supercienkie prezerwatywy dla większej bliskości, 10 szt.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik.

## Informacje dodatkowe Durex Invisible, supercienkie prezerwatywy dla większej bliskości, 10 szt.

Testowane dermatologicznie.

ISO 4074:2002

W 100% testowane elektronicznie.

Żadna metoda antykoncepcji nie zapewnia 100% ochrony przed ciążą, HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Przechowywać w miejscu suchym, temperaturze pokojowej, z dala od promieni słonecznych

Przeczytaj uważnie ulotkę załączoną wewnątrz opakowania, zwłaszcza jeśli używasz prezerwatywy przy stosunku analnym lub oralnym.

## Galeria

