

## Fridababy Windi, kateter rektalny dla niemowląt od 1 dnia życia, 10 szt.



Cena: 45,29 zł

### Opis słownikowy

Producent	SKANDPROJEKT S.C.
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Fridababy Windi, kateter rektalny dla niemowląt od 1 dnia życia, 10 szt.

Kateter rektalny Fridababy Windi jest bezpiecznym wyrobem medycznym przeznaczonym do usuwania gazów z układu pokarmowego niemowląt. Błyskawicznie przynosi ulgę przy gazach i kolce. Stosowany zgodnie z instrukcją nie podrażnia błony śluzowej odbytu. Pomaga uniknąć stosowania preparatów farmaceutycznych. Rurka na kolki Fridababy może być stosowana już od pierwszych dni życia.

## Skład Fridababy Windi, kateter rektalny dla niemowląt od 1 dnia życia, 10 szt.

### Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera 10 sztuk katetrów.

## Działanie Fridababy Windi, kateter rektalny dla niemowląt od 1 dnia życia, 10 szt.

Kateter rektalny Windi to szwedzki wyrób medyczny dedykowany do usuwania nadmiaru gazów z układu pokarmowego dzieci już od 1. dnia życia. Preparat, używany według instrukcji jest bezpieczny i nie podrażnia śluzówki odbytu. Stosowanie kateteru pozwala uniknąć potrzeby użycia preparatów farmakologicznych. Produkt nie zawiera BPA.

## Wskazania Fridababy Windi, kateter rektalny dla niemowląt od 1 dnia życia, 10 szt.

Usuwanie gazów z układu wydalniczego u niemowląt.  
Pomocniczo w przypadku kolki.

## Dawkowanie Fridababy Windi, kateter rektalny dla niemowląt od 1 dnia życia, 10 szt.

Delikatnie rozmasuj brzusek dziecka zgodnie z ruchem wskazówek zegara kierując się do dołu.  
Natłuść końcówkę katetera.  
Unieś nóżki dziecka i przygotuj pieluchę.  
Delikatnie wprowadź końcówkę katetera do odbytu.  
Odczekaj kilkanaście sekund, aż usłyszysz wydostające się na zewnątrz gazy.  
W razie potrzeby czynność powtórz.  
Po usunięciu gazów wyjmij i wyrzuć użyty kateter.

## Przeciwwskazania Fridababy Windi, kateter rektalny dla niemowląt od 1 dnia życia, 10 szt.

Nie zostawiać rurki Windi w odbycie dziecka.  
Nie używać częściej niż 3 razy na dobę.

## Informacje dodatkowe Fridababy Windi, kateter rektalny dla niemowląt od 1 dnia życia, 10 szt.

Po każdorazowym zabiegu rurkę należy wyrzucić.  
Ponowne użycie tego samego przyrządu może stanowić ryzyko infekcji.

### Producent

DiProServa Medical AB  
St Johannesgatan 2  
211 46 Malmö  
Szwecja

### Dystrybutor

PROFIMED Sp. z o.o.,  
ul. Na Uboczu 28B lok. UB7  
02-791 Warszawa