

GlucoDr. auto A, paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 50 szt.

Cena: 44,99 zł



Opis słownikowy

Marka	GlucoDr.
Postać	test
Producent	Diather
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe GlucoDr. auto A, paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 50 szt.

Test paskowy GlucoDr auto A to wyrób medyczny, do samodzielnego stosowania. Produkt kompatybilny z z glukometrami GlucoDR.auto oraz GlucoDR.auto A.

Skład GlucoDr. auto A, paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 50 szt.

Skład chemiczny paska testowego	
Dehydrogenaza glukozowa	7 µg
Wielazocyanek potasu	26 µg
Substancja wiążąca	1,6 µg
Stabilizator	0,5 µg

Zawartość opakowania

Paski do pomiaru stężenia glukozy we krwi, 50 szt.

Działanie GlucoDr. auto A, paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 50 szt.

Wyrób medyczny GlucoDr auto A służy do monitorowania stężenia glukozy we krwi, został wyposażony w technologię auto-coding, autokod pojawiający się na wyświetlaczu jest dopasowany do autokodu nadrukowanego na folce pasków testowych. Optymalna objętość krwi wykorzystanej do pomiaru wynosi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru potrzebny do analizy to 5 sekund. Wyniki pomiaru podawane są w mg/dl i mmol/l. Posiada system detekcji zbyt małej ilości krwi.

Wskazania GlucoDr. auto A, paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 50 szt.

Przeznaczenie produktu
Pomiar stężenia glukozy we krwi.

Wskazania

Wyrób medyczny GlucoDr auto A testy paskowe są przeznaczone do użytku z glukometrem GlucoDr. auto A i GlucoDr. auto

Dawkowanie GlucoDr. auto A, paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 50 szt.

Po wyjęciu paska testowego z folki, natychmiast zamknij folkę, i wsuń pasek do szczeliny paska w glukometrze. Glukometr włączy się automatycznie, a następnie na ekranie pojawi się symbol kropli krwi oznaczający gotowość aparatury do wykonania pomiaru glikemii. Uzyskaną kroplę krwi należy przyłożyć do bocznej krawędzi paska testowego, w miejscu w którym otwór chłonny paska dochodzi do jego brzegu (miejsce zostało wskazane rysunkiem na pasku). Kroplę krwi należy przytrzymać przy otworze chłonnym paska, aż do momentu w którym glukometr wyda sygnał dźwiękowy. Glukometr rozpocznie odliczanie, a następnie na ekranie pojawi się wynik pomiaru. Zużyty pasek należy usunąć bezkontaktowo, za pomocą przycisku z boku glukometru, zaraz po wykonaniu pomiaru.

Stosowanie produktu

Do pomiaru stężenia glukozy we krwi.

Informacje dodatkowe GlucoDr. auto A, paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 50 szt.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wszystkie paski należy wykorzystać w ciągu 4 miesięcy po otwarciu folki.
Nie używać po przekroczeniu daty ważności.
Przechowywać w temperaturze 1-32oC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.