

Gruszka z kanką nr 7, 1 szt. Kej



Cena: 6,99 zł

Opis słownikowy

Postać	gruszka
Producent	Kej
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Wskazania Gruszka z kanką nr 7, 1 szt. Kej

Gruszka z kanką przeznaczona jest do wykonywania lewatywy doodbytniczej zarówno u dzieci, jak i dorosłych w celu łagodzenia zaparć, kolek brzusznych, przed zabiegami chirurgicznymi w okolicach jamy brzusznej.

Dawkowanie Gruszka z kanką nr 7, 1 szt. Kej

Przed każdym użyciem gruszki z kanką do wykonania lewatywy, jak i po jej zakończeniu, należy starannie ją umyć w ciepłej wodzie z mydłem, oddzielając kankę od gruszki.

Wymyte części wygotować w wodzie przez 10 minut. Następnie zamontować kankę, wkładając jej krótszy koniec do otworu gruszki, aż do oparcia się kołnierza kanki o krawędź gruszki.

Napełnić gruszkę rumiankiem, roztworem soli fizjologicznej lub innym roztworem zaleconym przez lekarza.

Zastosowana ciecz powinna mieć temperaturę od 32 do 34 °C.

Kankę posmarować cienką warstwą wazeliny kosmetycznej i powoli wprowadzić do odbytu bez wywierania ucisku, po czym nacisnąć gruszkę w taki sposób, aby opróżnić jej zawartość do jelita.

Po wykonaniu tej czynności ścisnąć pośladki i wyjąć kankę z odbytu.

Do zapobieżenia wycieku wprowadzonego płynu należy jeszcze przez kilka minut trzymać ściśnięte pośladki.

Informacje dodatkowe Gruszka z kanką nr 7, 1 szt. Kej

Gruszkę należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.
Każde wykonanie lewatywy winno być skonsultowane z lekarzem.
Gruszka z kanką jest wyrobem indywidualnego użytku.
Lewatywy nie należy wykonywać samodzielnie.
Zabrania się wykonywania lewatywy przez dzieci.
Lewatywy mogą być wykonywane w warunkach domowych, bądź szpitalnych.