

Gruszka z miękkim końcem nr 2 do 6 msc. życia, 1 szt. APTEO

Cena: 5,09 zł



Opis słownikowy

Marka	APTEO
Producent	Synoptis Pharma
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Gruszka z miękkim końcem nr 2 do 6 msc. życia, 1 szt. APTEO

Gruszka z miękkim końcem nr 2 APTEO zalecana do stosowania u dzieci do 6. miesiąca życia.

Wskazania Gruszka z miękkim końcem nr 2 do 6 msc. życia, 1 szt. APTEO

zapobieganie infekcjom górnych dróg oddechowych poprzez usuwanie wydzieliny kataralnej z nosa,
zapobieganie stanom zapalnym uszu poprzez usuwanie woskowiny.

Wyrób medyczny (nr 2) zalecany do stosowania u dzieci do 6. miesiąca życia.

Dawkowanie Gruszka z miękkim końcem nr 2 do 6 msc. życia, 1 szt. APTEO

Stosowanie do nosa:

Gruszkę ścisnąć w dłoni, a następnie miękką końcówkę przyłożyć do otworu nosowego i uwolnić gruszkę z uścisku. Następuje zasysanie wydzieliny z nosa.

Stosowanie do uszu:

Gruszką zassać niewielką ilość letniej wody, przechylić głowę na bok i zakropić ciecz do ucha. Nie wprowadzać głęboko miękkiej końcówki - należy pozwolić, aby woda powoli spłynęła po ścianie kanału słuchowego. Następnie przechylić głowę w przeciwną stronę, aby pozbyć się cieczy. Czynność powtórzyć.

Przed każdym użyciem i po użyciu gruszkę umyć w ciepłej wodzie z mydłem i włożyć do gotującej się wody na 10 minut.

Informacje dodatkowe Gruszka z miękkim końcem nr 2 do 6 msc. życia, 1 szt. APTEO

Nie stosować środków dezynfekujących,

Nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej,

Wszelkie czynności związane z użytkowaniem gruszki z miękkim końcem powinna wykonywać osoba dorosła.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.