

## Gruszka z miękkim końcem nr 7, 1 szt. APTEO



Cena: 5,89 zł

### Opis słownikowy

Marka	APTEO
Postać	gruszka
Producent	Synoptis Pharma
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Gruszka z miękkim końcem nr 7, 1 szt. APTEO

Gruszka APTEO posiada bezpieczną zaokrągloną końcówkę. Wyrób medyczny (nr 7) zalecany do stosowania u dzieci od 6 miesiąca do 1 roku.

### Wskazania Gruszka z miękkim końcem nr 7, 1 szt. APTEO

Wyrób medyczny (nr 7) zalecany do stosowania u dzieci od 6 miesiąca do 1 roku.

zapobieganie infekcjom górnych dróg oddechowych poprzez usuwanie wydzieliny kataralnej z nosa,  
zapobieganie stanom zapalnym uszu poprzez usuwanie woskowiny.

### Dawkowanie Gruszka z miękkim końcem nr 7, 1 szt. APTEO

Przed każdym użyciem i po nim: umyć gruszkę w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie włożyć na 10 minut do gotującej się wody.  
Stosowanie do nosa: gruszkę ścisnąć w dłoni, a następnie miękką końcówkę przyłożyć do otworu nosowego i uwolnić gruszkę z uścisku. Następuje zasysanie wydzieliny z nosa.  
Stosowanie do uszu: gruszką zassać niewielką ilość letniej wody, przechylić głowę na bok i zakropić ciecz do ucha. Nie wprowadzać głęboko miękkiej końcówki – należy pozwolić, aby woda powoli spłynęła po ściance kanału słuchowego. Następnie przechylić głowę w przeciwną stronę, aby pozbyć się cieczy. Czynność powtórzyć.

## Informacje dodatkowe Gruszka z miękkim końcem nr 7, 1 szt. APTEO

Nie stosować środków dezynfekujących,

Nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej,

Wszelkie czynności związane z użytkowaniem gruszki z miękkim końcem powinna wykonywać osoba dorosła.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.