

Heltiso, kompres żelowy ciepło-zimno 13 x 17 cm, 1 szt.

Cena: 13,79 zł



Opis słownikowy

Marka	Heltiso
Postać	kompres
Producent	NTRADE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Heltiso, kompres żelowy ciepło-zimno 13 x 17 cm, 1 szt.

Heltiso Kompres żelowy ciepło-zimno 13 x 17 cm to wyrób medyczny stosowany w stłuczeniach, zwichnięciach, urazach, przegrzaniach i innych przypadkach wymagających krioterapii.

Skład Heltiso, kompres żelowy ciepło-zimno 13 x 17 cm, 1 szt.

Zawartość opakowania

1 kompres żelowy ciepło-zimno 13 x 17 cm.

Wskazania Heltiso, kompres żelowy ciepło-zimno 13 x 17 cm, 1 szt.

Terapia zimnem:

stłuczenia, zwichnięcia, urazy, przegrzanie i inne przypadki wymagające krioterapii.

Terapia ciepłem:

lumbago, zeszywnienie karku, reumatyzm, wychłodzenie i inne przypadki wymagające ogrzania ciała.

Dawkowanie Heltiso, kompres żelowy ciepło-zimno 13 x 17 cm, 1 szt.

Do terapii **zimnem** należy kompres chłodzić w zamrażarce przez co najmniej 2 godziny. Wyjąć z zamrażarki, włożyć do kieszeni odzieży lub zawinąć w tkaninę, aby przyłożyć do leczonego miejsca na ciele.

Do terapii **cieplem** należy podgrzać we wrzącej wodzie przez nie więcej niż 5 minut lub w kuchenke mikrofalowej przez nie więcej niż 1 minutę przy 650 watach, następnie wyjąć i włożyć do kieszeni odzieży lub zawinąć w tkaninę, aby przyłożyć do leczonego miejsca na ciele.

Przeciwwskazania Heltiso, kompres żelowy ciepło-zimno 13 x 17 cm, 1 szt.

Nie stosować na zranioną skórę.

Informacje dodatkowe Heltiso, kompres żelowy ciepło-zimno 13 x 17 cm, 1 szt.

Nie połykać, nie rozrywać torebki foliowej.

W przypadku chorób krążenia krwi lub cukrzycy należy zasięgnąć porady lekarza.

Zawiera glikol propylenowy, błękit metylenowy, hydroksymetylocelulozę i wodę.

Nie stosować na zranioną skórę.

Przechowywać z dala od dzieci.