

Hyal-Drop Ultra 4S, krople do oczu, 10 ml



Cena: 50,49 zł

Opis słownikowy

Marka	Hyal-Drop
Postać	krople
Producent	Bausch & Lomb
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Kwas hialuronowy, Trehaloza

Opis produktu

Informacje podstawowe Hyal-Drop Ultra 4S, krople do oczu, 10 ml

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) zapewniający odpowiednie nawilżenie rogówki i spojówek oraz wspomagający regenerację nabłonka powierzchni oka.

Skład Hyal-Drop Ultra 4S, krople do oczu, 10 ml

hialuronian sodu, trehaloza, fukoidyna, D-pantenol, chlorek sodu, woda wysokooczyszczona

Działanie Hyal-Drop Ultra 4S, krople do oczu, 10 ml

Krople Hyal-Drop Ultra 4 S przeznaczone są do intensywnego nawilżania oraz wspomagania regeneracji bariery ochronnej powierzchni oka przy jego suchości. Łagodzą objawy zespołu suchego oka o umiarkowanym i ciężkim przebiegu. Przyspieszają regenerację powierzchniowych struktur oka po zabiegach operacyjnych.

Wskazania Hyal-Drop Ultra 4S, krople do oczu, 10 ml

Krople do oczu intensywnie nawilżają oraz wspomagają regenerację bariery ochronnej powierzchni oka:

- zapewniają łagodzenie objawów zespołu suchego oka o umiarkowanym i ciężkim przebiegu, takich jak uczucie suchości oka, uczucie obecności piasku pod powiekami, pieczenie lub zmęczenie oczu związane m.in. z pracą przy komputerze, długotrwałym oglądaniem telewizji, suchym powietrzem w pomieszczeniach ogrzewanych lub klimatyzowanych, dymem papierosowym, wiatrem lub przyjmowaniem niektórych leków;
- przyspieszają regenerację powierzchniowych struktur oka po zabiegach operacyjnych, w tym laserowych, które zaburzają procesy wydzielania i odpowiedniego rozprowadzania filmu łzowego.

Preparat przeznaczony dla dorosłych.

Dawkowanie Hyal-Drop Ultra 4S, krople do oczu, 10 ml

Dorośli: zwykle stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego 3–4 razy na dobę; w przypadku nasilonych dolegliwości można stosować częściej. Preparat może być stosowany długotrwale

Sposób użycia:

Preparat ma postać kropli do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania preparatu, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem. Nie należy dotykać końcówką zakraplacza powierzchni oka ani jakiegokolwiek innej powierzchni. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów okulistycznych, należy zachować co najmniej 15 minutowy odstęp czasowy przed podaniem preparatu. Preparat należy stosować jako ostatni.

Przeciwwskazania Hyal-Drop Ultra 4S, krople do oczu, 10 ml

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować w przypadku bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych lub innych zakażeń oka.

Informacje dodatkowe Hyal-Drop Ultra 4S, krople do oczu, 10 ml

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Preparat jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego.

Jeżeli wystąpią reakcje alergiczne, należy przerwać stosowanie preparatu.

Po otwarciu butelki, krople powinny być używane tylko przez 1 osobę.

Preparat nie zawiera konserwantów.

Preparat może być stosowany codziennie, nie dłużej niż 30 dni od pierwszego otwarcia. W sposób nieciągły (uwzględniając kilkudniowe przerwy w aplikacji) można stosować nie dłużej niż 90 dni od pierwszego otwarcia.

Ważne wskazówki:

W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów okulistycznych, należy zachować co najmniej 15 minutowy odstęp czasowy przed podaniem preparatu. Preparat należy stosować jako ostatni.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5° C do 35° C.

Producent:

Suprobion Sp. z o.o., Sp. k.

Ul. Kiełczowska 2,

55-095 Mirków

Dystrybutor:

Bausch & Lomb Poland sp. z o.o.
 Aleja Szucha 13/15, 00-580 Warszawa

Galeria

Hyal-Drop® Ultra 4S nawilżenie z 4 składnikami

*Hyal-Drop® Ultra 4S to krople do oczu przeznaczone do intensywnego nawilżenia oraz wspomaganego regeneracji barwiny siatkówki powierzchni oka przy jego uszkodzeniu. Składnik pomocniczy: glicerol. Producent: SUPROBION Sp. z o.o. Należy przestrzegać zaleceń i informacji dotyczących aplikacji Hyal-Drop® Ultra 4S.

TO JEST WYROB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Hyal-Drop® Ultra 4S

Do zastosowania w ZSO o umiarkowanym i ciężkim przebiegu

*Hyal-Drop® Ultra 4S to krople do oczu przeznaczone do intensywnego nawilżenia oraz wspomaganego regeneracji barwiny siatkówki powierzchni oka przy jego uszkodzeniu. Składnik pomocniczy: glicerol. Producent: SUPROBION Sp. z o.o. Należy przestrzegać zaleceń i informacji dotyczących aplikacji Hyal-Drop® Ultra 4S.

TO JEST WYROB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Hyal-Drop® Ultra 4S

- Fukoidyna 0,1%
- Trehaloza 3%
- Kwas hialuronowy 0,15%
- D-pantenol 2%

Hyal-Drop® Ultra 4S to jedyne dostępne na polskim rynku krople do oczu zawierające 4 takie nawilżające składniki!

*Hyal-Drop® Ultra 4S to krople do oczu przeznaczone do intensywnego nawilżenia oraz wspomaganego regeneracji barwiny siatkówki powierzchni oka przy jego uszkodzeniu. Składnik pomocniczy: glicerol. Producent: SUPROBION Sp. z o.o. Należy przestrzegać zaleceń i informacji dotyczących aplikacji Hyal-Drop® Ultra 4S.

TO JEST WYROB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Hyal-Drop® Ultra 4S

Elastyczność dawkowania: 3-4 razy/ dzień, w razie potrzeby można aplikować częściej!

*Hyal-Drop® Ultra 4S to krople do oczu przeznaczone do intensywnego nawilżenia oraz wspomaganego regeneracji barwiny siatkówki powierzchni oka przy jego uszkodzeniu. Składnik pomocniczy: glicerol. Producent: SUPROBION Sp. z o.o. Należy przestrzegać zaleceń i informacji dotyczących aplikacji Hyal-Drop® Ultra 4S.

TO JEST WYROB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Hyal-Drop® Ultra 4S

Przyspiesza regenerację powierzchni oka po zabiegach operacyjnych!

*Hyal-Drop® Ultra 4S to krople do oczu przeznaczone do intensywnego nawilżenia oraz wspomaganego regeneracji barwiny siatkówki powierzchni oka przy jego uszkodzeniu. Składnik pomocniczy: glicerol. Producent: SUPROBION Sp. z o.o. Należy przestrzegać zaleceń i informacji dotyczących aplikacji Hyal-Drop® Ultra 4S.

TO JEST WYROB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.