

Igła jednorazowego użytku 0,45 x 16 mm KD-FINE, 100 szt.

Cena: 14,19 zł



Opis słownikowy

Marka	KD-FINE
Postać	igły
Producent	Kd Medical
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Igła jednorazowego użytku 0,45 x 16 mm KD-FINE, 100 szt.

Igła iniekcyjna KD-FINE zakończona końcówką typu Luer-Lock. Wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej olejem silikonowym, dzięki czemu zapewniają minimalny opór tkanki skóry w momencie wkłuwania. KD FINE są igłami nietoksycznymi i niepirogennymi. Charakteryzują się szczególną ostrością bo są ostrzone za pomocą specjalistycznego wałka szlifierskiego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii produkcji igły zapewniają najwyższy komfort wkłucia. Produkt jest całkowicie sterylny za pomocą tlenu etylenu (EO) oraz służy do jednorazowego użytku dzięki czemu można zapobiec wszelkim zakażeniom, a także podnieść jakość wykonywanych usług.

Skład Igła jednorazowego użytku 0,45 x 16 mm KD-FINE, 100 szt.

Obsadka igły - polipropylen, Rurka igły - stal nierdzewna, Klej - klej epoksydowy, Nasadka zabezpieczająca - polipropylen, Smar - olej silikonowy.

Igły pakowane są w sterylnej, każda osobno. Rozmiar 0,45 x 16mm (26G x 5/8) Opakowanie zbiorcze zawiera 100 szt.

Działanie Igła jednorazowego użytku 0,45 x 16 mm KD-FINE, 100 szt.

jednorazowego użytku, nietoksyczne i niepirogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO),

zaopatrzone w zatyczkę typu luer lock,
nadmierzająco ostre - ostrzone za pomocą wałka szlifierskiego,
pokrycie silikonem powierzchni rurek.

Wskazania Igła jednorazowego użytku 0,45 x 16 mm KD-FINE, 100 szt.

nakłuwanie tkanki mięśniowej, skóry oraz żył w celu iniekcji leku, pobierania krwi, transfuzji.

Dawkowanie Igła jednorazowego użytku 0,45 x 16 mm KD-FINE, 100 szt.

- Przed użyciem igły należy sprawdzić czy opakowanie jest zamknięte i czy plastikowa osłonka nie jest zdjęta.
- Otworzyć opakowanie i wyjąć igłę.
- Usunąć plastikową osłonkę, sprawdzić czy końcówka igły jest cała, natychmiast użyć igłę.

Informacje dodatkowe Igła jednorazowego użytku 0,45 x 16 mm KD-FINE, 100 szt.

KD-FINE spełniają wszystkie normy jak i dyrektywy UE: normy EN ISO 7864, dyrektywy MD 93/42EEC oraz wyrobów medycznych zgodne z EN ISO 13485 i CE 0123.

Galeria

