

iXellence Neb Mini, nebulizator kompresorowy, 1 szt.

Cena: 226,79 zł



Opis słownikowy

Marka	iXellence
Postać	inhalator
Producent	Genexo
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe iXellence Neb Mini, nebulizator kompresorowy, 1 szt.

Nebulizator iXellence Neb Mini to wyrób medyczny umożliwiający inhalację wszystkimi lekami w tym kortykosteroidy oraz pozostałych substancji przeznaczonych do nebulizacji. Inhalator NEB Mini cechuje się bardzo dobrymi parametrami w tym frakcją respirabilną, dzięki temu inhalacja jest efektywna, przy zapewnieniu optymalnej szybkości nebulizacji. W zestawie znajdziemy maseczki dla dzieci i dla dorosłych oraz ustnik.

Skład iXellence Neb Mini, nebulizator kompresorowy, 1 szt.

Zawartość opakowania

W skład zestawu wchodzi: inhalator, maseczki dla dzieci i dla dorosłych, ustnik, zestaw 4 baterii AA, instrukcja obsługi oraz kartę gwarancyjną.

Wskazania iXellence Neb Mini, nebulizator kompresorowy, 1 szt.

Produkt przeznaczony jest do prowadzenia inhalacji u wszystkich członków rodziny.

Dawkowanie iXellence Neb Mini, nebulizator kompresorowy, 1 szt.

Podłącz kompresor do prądu, sprawdź czy filtr powietrza znajduje się na swoim miejscu i włącz urządzenie. Do zbiornika na lek wlać wodę pitną (2-5 ml). Nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie i sprawdzić, czy nebulizacja przebiega prawidłowo. Wylać pozostałą wodę i ponownie rozpocząć proces z użyciem przepisanej przez lekarza leku.
Sposób użycia ustnika:

Podłączyć ustnik z pokrywą.
Objąć dokładnie ustami ustnik i rozpocząć inhalację zgodnie z zaleceniami lekarza.
Sposób użycia maski:

Połączyć maskę z pokrywą
Umieścić maskę na twarzy i rozpocząć inhalację zgodnie z zaleceniami lekarza.

Informacje dodatkowe iXellence Neb Mini, nebulizator kompresorowy, 1 szt.

Nie należy pochylać zestawu nebulizatora pod kątem 45o w każdej płaszczyźnie. Może to spowodować przedostanie się leku do ust, jak również być przyczyną nieefektywnej nebulizacji.

Przechowywać nebulizator poza zasięgiem dzieci.

Wielkość cząstek MMAD	2,5 µm
Fracja respirabilna	95,49% (ilość cząstek <5 µm)
Tempo nebulizacji	> 2 ml/min
Pojemność pojemnika na lek	10 ml
Tryb pracy	30 min / 30 min
Gwarancja	3 lata od daty zakupu