

Lancety do nakłuwacza Glucosense iXell, 100 szt.

Cena: 26,19 zł



Opis słownikowy

Postać	lancety
Producent	Genexo
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Lancety do nakłuwacza Glucosense iXell, 100 szt.

Lancet Glucosense iXell jest przeznaczony do nakłuwaczy z zestawów glukometrów: Glucosense pro, Glucosense, iXell audio oraz iXell. W opakowaniu znajduje się 100 lancetów do nakłuwacza.

Działanie Lancety do nakłuwacza Glucosense iXell, 100 szt.

Cechy lancetów Glucosense iXell:

bardzo cienka igła pokryta polietylenem,

wielkość ostrza - 30G.

ostrze szlifowane w trzech płaszczyznach,

sterylne,

jednorazowego użytku.

Wskazania Lancety do nakłuwacza Glucosense iXell, 100 szt.

Do nakłuwania palca przy pobieraniu krwi włośniczkowej do pomiaru stężenia glukozy, przy użyciu glukometrów Glucosense lub iXell.

Dawkowanie Lancety do nakłuwacza Glucosense iXell, 100 szt.

Zawsze używaj lancetów tylko z nakłuwaczami Glucosense/iXell, zgodnie z instrukcją dołączoną do glukometru.

Przed rozpoczęciem badania dokładnie umyj i osusz ręce.

Około 20 s przed nakłuciem rozmasuj miejsce, z którego ma być pobrana krew.

Miejsce nakłucia można przetrzeć 70% alkoholem. Przed nakłuciem alkohol musi całkowicie wyparować.

Przekręć i zdejmij nakładkę nakłuwacza.

Umieść lancet w prowadnicy i zdecydowanie wciśnij tak, aby lancet był stabilnie przymocowany.

Odkręć dysk zabezpieczający ostrze.

Aby zamknąć blokadę nałóż i przekręć nakładkę, aż do usłyszenia kliknięcia. Przy prawidłowo zamkniętej blokadzie, wskaźnik znajduje się w skrajnie prawym położeniu.

Wybierz głębokość nakłucia skóry przekręcając regulowaną końcówkę tak, aby strzałka znajdująca się na niej wskazywała wybraną głębokość nakłucia (możliwe jest ustawienie 6 stopni głębokości nakłucia).

Pociągnij ruchomy trzonek do momentu kliknięcia. W okienku pojawi się pomarańczowa kreska co oznacza, że nakłuwacz jest gotowy do użycia. Pamiętaj, aby trzymać palce na nakłuwaczu, a nie na nakładce.

Przyłóż końcówkę nakłuwacza dokładnie do bocznej części opuszki palca. Naciśnij przycisk zwalniający, słyszalne kliknięcie oznacza, że nakłucie zostało wykonane.

Delikatnie rozmasuj obszar nakłucia, aby uzyskać wystarczającą ilość krwi. Pamiętaj, że nigdy nie można na siłę wyciskać kropli krwi.

Informacje dodatkowe Lancety do nakłuwacza Glucosense iXell, 100 szt.

Nie używać, jeśli tarcza zabezpieczająca została usunięta.

Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone.

Wyrób jednorazowego użytku. Nie używać ponownie!

Za każdym razem używaj nowego, sterylnego ostrza.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ostrza i nakłuwacz są przeznaczone do użytku tylko przez jedną osobę.

Nie wykonuj badania, jeśli ręce są zanieczyszczone kurze, brudem, kremem lub tłuszczem.

Unikaj zanieczyszczenia nakłuwacza i ostrza lancetu.

Zużyte lancety wyrzucaj zgodnie z lokalnymi przepisami, ponieważ mogą stanowić źródło zakażenia.