

## Lapis Diabelski Kamyk, sztyft do usuwania brodawek, 1 szt.

Cena: 25,99 zł

### Opis słownikowy

Postać	sztyft
Producent	Salus International
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Srebro



### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Lapis Diabelski Kamyk, sztyft do usuwania brodawek, 1 szt.

Do usuwania zmian rozrostowych skóry o charakterze brodawek zwykłych.

#### Skład Lapis Diabelski Kamyk, sztyft do usuwania brodawek, 1 szt.

Sztyft: azotan srebra 97 części, azotan potasu 3 części.

#### Działanie Lapis Diabelski Kamyk, sztyft do usuwania brodawek, 1 szt.

Lapis Diabelski Kamyk przyspiesza ziarninowanie i epitelializację, a tym samym wspomaga proces gojenia. Azotan srebra, który jest podstawowym składnikiem sztyftu, skutecznie wspomaga gojenie uszkodzeń skóry.

#### Wskazania Lapis Diabelski Kamyk, sztyft do usuwania brodawek, 1 szt.

Wyrób medyczny stosowany jest do usuwania zmian rozrostowych skóry o charakterze brodawek zwykłych. Stosowany jest pomocniczo w leczeniu niektórych zmian skórnych pochodzenia wirusowego: brodawek zwykłych oraz kłykcin kończystych.

## Dawkowanie Lapis Diabelski Kamyk, sztyft do usuwania brodawek, 1 szt.

Należy dokładnie przeczytać ulotkę informacyjną aby uniknąć nieprawidłowego użycia wyrobu medycznego.

Przed użyciem należy założyć okulary ochronne. Zaleca się również stosowanie rękawic ochronnych.

Zdjąć z produktu zatyczkę ochronną oraz usunąć cienką, kolorową warstwę parafiny, która chroni sztyft przed wilgocią z powietrza.

Z czubka sztyftu bardzo delikatnie usunąć kolorową warstwę zielonej parafiny. Nie wdychać pyłu.

Ostrożnie pocierać powierzchnię brodawki (kurzajki) sztyftem ruchami kołowymi przez kilka sekund. Naturalna wilgotność dotkniętego miejsca po kilku minutach rozpocznie reakcję z azotanem srebra.

Nie dopuścić do kontaktu ze zdrową skórą.

Po 24 godzinach od aplikacji można przyspieszyć gojenie poprzez delikatne usunięcie powstałej czarnej plamy. Zabieg należy powtarzać, aż do całkowitego zniknięcia kurzajki.

## Informacje dodatkowe Lapis Diabelski Kamyk, sztyft do usuwania brodawek, 1 szt.

Nie stosować razem z innymi preparatami stosowanymi do leczenia kurzajek.

Nie stosować na znamiona, ciemne plamy na skórze, piegi, brodawki wodne i brodawki łojotokowe.

Przy obecności chorób, a także w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie rodzaju brodawki należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować na błony śluzowe, miejsca silnie ukrwione oraz w przypadku zmian zlokalizowanych w okolicy oczu.