

# Maseczka z ustnikiem do sztucznego oddychania, 1 szt. APTEO

Cena: 9,19 zł



## Opis słownikowy

Marka	APTEO
Producent	Synoptis Pharma
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Maseczka z ustnikiem do sztucznego oddychania, 1 szt. APTEO

Produkt przeznaczony jest do udzielania pierwszej pomocy – sztucznego oddychania metodą usta-usta.

### Skład Maseczka z ustnikiem do sztucznego oddychania, 1 szt. APTEO

#### Zawartość:

Maseczka do sztucznego oddychania z plastikowym ustnikiem, na folii z nadrukowaną instrukcją udzielania pomocy.

### Działanie Maseczka z ustnikiem do sztucznego oddychania, 1 szt. APTEO

Dzięki zastawce kierunkowej zmniejsza ryzyko zakażenia podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ustnik posiada ergonomiczny, ułatwiający użycie kształt – wydłużony ustnik umożliwia pewny chwyt maseczki ustami i łatwiejszą resuscytację.

Na folii nadrukowana jest instrukcja udzielania pomocy. Maseczka umieszczona jest w zamykanej foliowej torebce.

## Wskazania Maseczka z ustnikiem do sztucznego oddychania, 1 szt. APTEO

Produkt przeznaczony jest do udzielania pierwszej pomocy - sztucznego oddychania metodą usta-usta.

## Dawkowanie Maseczka z ustnikiem do sztucznego oddychania, 1 szt. APTEO

1. Sprawdź przez minimum 10 sekund czy poszkodowany oddycha. Jeśli nie, wezwij pogotowie i rozpocznij resuscytację.
2. Jeśli poszkodowany nie oddycha, udroźnij drogi oddechowe. Odchyl głowę i podnieś żuchwę dwoma palcami.
3. Wykonaj 30 uciśnień klatki piersiowej na środku mostka.
4. Umieść ustnik w ustach nieprzytomnego i zaciśnij jego nos. Wdmuchnij powietrze, obejmując ustami drugą stronę ustnika. Obserwuj, jak klatka piersiowa się podnosi.
5. Pozwól aby powietrze wyleciało. Wdmuchnij powietrze ponownie.
6. Powtarzaj czynność (30 uciśnień na 2 wdechy) do chwili powrotu oddechu lub przyjazdu ambulansu.

## Informacje dodatkowe Maseczka z ustnikiem do sztucznego oddychania, 1 szt. APTEO

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.