

MD-Neural, roztwór do iniekcji, 2 ml x 10 fiolek



Cena: 582,29 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Postać | roztwór |
| Producent | AMBRA GROUP S.C. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |
| Substancja czynna | Chlorek sodu, Kolagen |

Opis produktu

Informacje podstawowe MD-Neural, roztwór do iniekcji, 2 ml x 10 fiolek

MD-Neural jest wyrobem medycznym mającym za zadanie usprawnić ruchy, przyczyniając się do ograniczenia fizjologicznego procesu degeneracji stawów i tkanek oraz do zrównoważenia uszkodzeń spowodowanych przez: starzenie się, wady postawy, przewlekłe choroby towarzyszące, urazy i obrażenia, czynniki zanieczyszczające.

Skład MD-Neural, roztwór do iniekcji, 2 ml x 10 fiolek

Kolagen, substancje pomocnicze: kolokwinta, NaCl, woda do iniekcji.

Działanie MD-Neural, roztwór do iniekcji, 2 ml x 10 fiolek

Kolagen jest głównym białkiem tkanki łącznej. Ma on bardzo wysoką odporność na rozciąganie, stanowi główny składnik ścięgien oraz wzmacnia i ochrania stawy. Stawy natomiast łączą ze sobą kości, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie ruchu w określonych płaszczyznach. Chrząstka stawowa pokrywa powierzchnie stawowe kości, a chrząstkę stawową buduje tkanka łączna. Chondrocyty (odpowiedzialne za biosyntezę kolagenu) i macierz międzykomórkowa tworzą jej włókniste odcinki i bezkształtne odcinki. Macierz odpowiada za elastyczność chrząstki, podczas gdy włókna kolagenowe zapewniają wytrzymałość. Kolagen stanowi 70% suchej masy stawowej.

Wyrób MD-NEUTRAL może być stosowany przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych. Można go stosować jako osobny zabieg lub, w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, aby odpowiednio

dostosować leczenie, w zależności od poprawy klinicznej.

W przypadku gdy konieczne jest leczenie wspomagające macierzy tkanki łącznej, lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, MD-NEURAL może być stosowany w połączeniu z MD-MATRIX i MD-TISSUE.

Wskazania MD-Neural, roztwór do iniekcji, 2 ml x 10 fiolek

Zaleca się stosowanie preparatu przez wykwalifikowanych pracowników sektora opieki zdrowotnej w celu: poprawy ruchomości stawu biodrowego, wspomaganie rozciągania mięśni obszaru krzyżowo-lędźwiowego, wsparcia okołostawowej tkanki mięśniowej, łagodzenia bólu wywołanego ruchem w stawie lub nieprawidłową postawą.

Dawkowanie MD-Neural, roztwór do iniekcji, 2 ml x 10 fiolek

1- 2 zabiegi raz w tygodniu przez 10 tygodni. Metoda iniekcji okołostawowej (miejsce wkłucia musi być zdezynfekowane, wprowadzić igłę na głębokość 2-4mm). W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów: sterylne rękawiczki, roztwór jodiny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w sprayu do skóry, igły sterylne 27G, strzykawki rozmiar 5 lub 10cc, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia.

Informacje dodatkowe MD-Neural, roztwór do iniekcji, 2 ml x 10 fiolek

Pacjenci przyjmujący środki przeciwzakrzepowe lub ze zdiagnozowaną kruchością naczyń krwionośnych lub cierpiący na zaburzenia krzepliwości powinni być dokładnie obserwowani podczas leczenia.

Pacjenci u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani testowi poprzez iniekcję miejscową wykonaną na ramieniu, a następnie obserwowani przez 1 godzinę.

Oczyszczenie skóry/dezynfekcja jest konieczna przed i po podaniu. Bakterie ropotwórcze mogą spowodować, że w okolicy wkłucia utworzy się ropień.

Nie stosować w przypadku uszkodzenia fiolek.

Chronić przed światłem słonecznym i zamarzaniem.

przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.