

# Microdacyn Hydrogel, roztwór hydrożel do leczenia ran, 250 g



Cena: 90,79 zł

## Opis słownikowy

Marka	Microdacyn
Postać	roztwór
Producent	Kikgel
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Microdacyn Hydrogel, roztwór hydrożel do leczenia ran, 250 g

Wyrób medyczny, butelka zawiera wygodny aplikator, o szerokim działaniu przeciwdrobnoustrojowym, może być stosowany do przepłukiwania ucha zewnętrznego, spojówki oka, jamy ustnej i tkanek takich jak więzadła i ścięgna.

### Skład Microdacyn Hydrogel, roztwór hydrożel do leczenia ran, 250 g

60 ppm (0,006%) podchlorynu sodu, 60 ppm (0,006%) kwas podchlorawy, woda oczyszczona

### Działanie Microdacyn Hydrogel, roztwór hydrożel do leczenia ran, 250 g

Microdacyn Hydrogel, hydrożel do leczenia ran

dzięki zwartej konsystencji utrzymuje się dłużej na ranie  
poprawia procesy autolitycznego oczyszczania rany  
ma szerokie spektrum skuteczności przeciwdrobnoustrojowej (wirusy, bakterie, zarodniki, grzyby),  
jest hipoalergiczny,  
ma właściwości przeciwzapalne,  
nie wymaga wypłukiwania z ran głębokich,  
bezpieczny dla zdrowych komórek,

nie powoduje uodpornienia bakterii,  
obojętny odczyn pH,  
niweluje nieprzyjemny zapach ran,  
dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT.

## Wskazania Microdacyn Hydrogel, roztwór hydrożel do leczenia ran, 250 g

Microdacyn Hydrogel jest przeznaczony do ran przewlekłych takich jak owrzodzenia, odleżyny czy stopa cukrzycowa oraz może być stosowany na odkrytych kościach, ścięgnach i więzadłach.

## Dawkowanie Microdacyn Hydrogel, roztwór hydrożel do leczenia ran, 250 g

W pierwszej kolejności należy wypłukać ranę płynem Microdacyn celem wypłukania zanieczyszczeń.  
Przed aplikacją żelu należy przekręcić aplikator w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara.  
Hydrożel stosujemy w ranach wymagających autolitycznego oczyszczenia.  
Stosując Microdacyn Hydrogel warstwę żelu można przykryć innym opatrunkiem specjalistycznym lub gazą nasączoną płynem Microdacyn, co zapobiegnie wsiąknięciu żelu w gazę.

## Informacje dodatkowe Microdacyn Hydrogel, roztwór hydrożel do leczenia ran, 250 g

Po otwarciu utrzymuje swoje aktywne działanie przez okres 60 dni.