

# Microdacyn Hydrogel, roztwór hydrożel do leczenia ran, 60 g

Cena: 45,49 zł



## Opis słownikowy

Marka	Microdacyn
Postać	roztwór
Producent	Kikgel
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Chlorek sodu

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Microdacyn Hydrogel, roztwór hydrożel do leczenia ran, 60 g

Microdacyn jest roztworem ponadtlenków (superoxidised solution), który łączy wysoką skuteczność przeciwdrobnoustrojową z bezpieczeństwem stosowania – brak działania cytotoksycznego dla zdrowych tkanek.

### Skład Microdacyn Hydrogel, roztwór hydrożel do leczenia ran, 60 g

Woda elektrolizowana, chlorek sodu, fluorokrzemian sodowo-magnezowy, fosforan sodu, substancje pomocnicze: podchloryn sodu i kwa podchlorawy.

### Działanie Microdacyn Hydrogel, roztwór hydrożel do leczenia ran, 60 g

Microdacyn posiada następujące właściwości:

Szerokie spektrum skuteczności przeciwdrobnoustrojowej (bakterie, wirusy, zarodniki, grzyby)

Wykazuje właściwości przeciwzapalne i jest hipoalergiczny

Jest bezpieczny dla zdrowych komórek. Nie są znane jego skutki uboczne

Nie wymaga wypłukiwania z ran głębokich

Może być stosowany do przepłukiwania ucha zewnętrznego, spojówki oka, tkanek takich więzadła i ścięgna

Nie powoduje uodpornienia bakterii

Niweluje nieprzyjemny zapach ran  
Dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT  
Obojętny odczyn pH

## Wskazania Microdacyn Hydrogel, roztwór hydrożel do leczenia ran, 60 g

Służy do płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak:

- Owrzodzenia
- Odleżyny
- Rany w przebiegu stopy cukrzycowej
- Rany oparzeniowe
- Rany pooperacyjne
- Owrzodzenia nowotworowe

## Dawkowanie Microdacyn Hydrogel, roztwór hydrożel do leczenia ran, 60 g

Przed aplikacją żelu należy wypłukać ranę płynem Microdacyn celem wypłukania zanieczyszczeń.

**UWAGA!!** Przed aplikacją żelu należy przekręcić aplikator w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara Hydrożel stosujemy w ranach wymagających autolitycznego oczyszczenia Stosując Microdacyn Hydrogel warstwę żelu można przykryć innym opatrunkiem specjalistycznym, np. Aqua-Gel lub gazą obficie nasączoną Microdacyn by zapobiec wsiąknięciu żelu w gazę.

## Informacje dodatkowe Microdacyn Hydrogel, roztwór hydrożel do leczenia ran, 60 g

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Należy przestrzegać środków ostrożności.  
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  
Trzymać z daleka od dzieci.  
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.