

Microlife BC 50, elektryczny aspirator do nosa dla dzieci, 1 szt.



Cena: 119,98 zł

Opis słownikowy

Marka	Microlife
Postać	aspirator
Producent	CHDE
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Microlife BC 50, elektryczny aspirator do nosa dla dzieci, 1 szt.

Elektryczny aspirator do nosa Microlife® BC50 to urządzenie niezastąpione w opiece nad niemowlętami i małymi dziećmi. Sprawdza się do szybkiego usuwania wydzieliny i śluzu z nosa u dzieci już od pierwszego miesiąca życia.

Nieżyt błony śluzowej nosa, nazywany potocznie katarom to problem, który bardzo często dotyka małe dzieci. Niemowlę nie potrafi oddychać przez usta, a dzieci do trzeciego roku życia nie są w stanie dobrze wydmuchać nosa przy pomocy chusteczki. Powoduje to duży dyskomfort, rozdrażnienie a niekiedy także problemy ze snem.

Skład Microlife BC 50, elektryczny aspirator do nosa dla dzieci, 1 szt.

Zawartość opakowania

1 x aspirator do nosa, elektryczny
2 x silikonowa końcówka,
instrukcja obsługi

Działanie Microlife BC 50, elektryczny aspirator do nosa dla dzieci, 1 szt.

Elektryczny aspirator do nosa Microlife® BC50 pozwala na usuwanie nadmiaru śluzu podczas kataru, co wspiera łagodzenie infekcji górnych dróg oddechowych i szybko przynosi ulgę.

Microlife® BC 50 czyści nos dziecka w prosty, higieniczny i skuteczny sposób w ciągu kilku sekund.

Cichy i wygodny aspirator BC50 Microlife® został wyposażony w miękkie silikonowe końcówki w 2 rozmiarach w zależności od wieku dziecka i rodzaju zalegającej wydzieliny. Kompaktowa i lekka konstrukcja oraz zasilanie bateryjne idealnie sprawdzi się w podróży, gdy nie masz możliwości podłączenia aspiratora do kontaktu.

Aspirator elektryczny marki Microlife® jest przy tym niezwykle bezpieczny i higieniczny. Kubeczek na śluz i końcówki do nosa można myć w zmywarce. Cała konstrukcja jest wodoodporna, i posiada łatwą funkcję automatycznego czyszczenia pompy.

Cechy produktu

cichy i wygodny,
kompaktowa i lekka konstrukcja – idealna w podróży
łatwa obsługa jednym przyciskiem
bezpieczny i higieniczny – kubeczek na śluz i końcówki do nosa można myć w zmywarce,
wodoodporna, łatwa funkcja automatycznego czyszczenia pompy
gwarancja "Door to Door".

Wskazania Microlife BC 50, elektryczny aspirator do nosa dla dzieci,1 szt.

Usuwanie wydzieliny i śluzu z nosa.
Odpowiedni dla dzieci już od pierwszego miesiąca życia.

Dawkowanie Microlife BC 50, elektryczny aspirator do nosa dla dzieci,1 szt.

Jak prawidłowo usunąć zalegającą wydzielinę z nosa?

Dobierz odpowiednią końcówkę do kształtu i rozmiaru nozdrzy dziecka oraz rodzaju wydzieliny:

-duża końcówka jest zalecana starszym dzieciom oraz gdy wydzielina jest gęsta,

-mała końcówka jest zalecana młodszym dzieciom oraz w przypadku, gdy wydzielina jest rozwodniona i ciekła.

Upewnij się, czy końcówka została dobrze założona i czy całkowicie obejmuje pierścień zabezpieczający na wylocie głowicy.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika ON/OFF, aby rozpocząć odsysanie wydzieliny.

Utrzymuj głowę dziecka prosto (w pionie) i wprowadź końcówkę do jednego z nozdrzy.

Uważaj, aby nie wepchnąć końcówki zbyt głęboko do nozdrza lub aby nie napierać na tylną ścianę jamy nosowej.

Staraj się utrzymywać aspirator w takiej pozycji, aby końcówka była prostopadła do powierzchni twarzy dziecka.

Nie kieruj końcówki w górę, w głąb nozdrza dziecka. Poczekać, aż aspirator wciągnie wydzielinę.

W razie konieczności czynność powtórz w drugim nozdrzu lub przeprowadź ponownie.

Zwolnij przycisk, aby zakończyć odsysanie.

Informacje dodatkowe Microlife BC 50, elektryczny aspirator do nosa dla dzieci,1 szt.

Specyfikacja techniczna

wymiary: 195 x 50 x 40 mm,

waga: 160 g (bez baterii),

warunki pracy:

temperatura: 5-40°C /41-104°F,

maksymalna wilgotność względna: ~15-93%,

zasilanie bateryjne: 2 x 1,5 V, rozmiar AA.

Gwarancja

3 lata

Ważne wskazówki

Przed pierwszym użyciem zalecane jest oczyszczenie urządzenia opisane w rozdziale "Czyszczenie i dezynfekcja".

Ostrzeżenia

To urządzenie nie jest zabawką! Trzymaj je z dala od dzieci i nie zostawiaj dzieci samych w trakcie leczenia

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Microlife® BC50 zapoznaj się z instrukcją obsługi i stosuj się ściśle do jej zaleceń.

Wyrób medyczny może być wykorzystywany wyłącznie do celów określonych w instrukcji.

Galeria

