

## Microlife BP B3 AFIB, automatyczny ciśnieniomierz naramienny, 1 szt.



Cena: 170,87 zł

### Opis słownikowy

Marka	Microlife
Postać	ciśnieniomierz
Producent	CHDE
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Microlife BP B3 AFIB, automatyczny ciśnieniomierz naramienny, 1 szt.

Wyrób medyczny.

To automatyczny ciśnieniomierz naramienny przeznaczony do bezpiecznego pomiaru ciśnienia krwi u osób w wieku 12 lat i starszych. Umożliwia wykonanie pojedynczego pomiaru w standardowym trybie lub trzy automatyczne pomiary (tryb MAM), które są następnie uśrednione i dają najbardziej wiarygodny wynik pomiaru ciśnienia krwi.

Pamięć 99 ostatnich pomiarów.

Rozmiar mankietu: M-L (22-42 cm)

## Skład Microlife BP B3 AFIB, automatyczny ciśnieniomierz naramienny, 1 szt.

### Zawartość opakowania

- 1 x ciśnieniomierz BP B3 AFIB,
- 1 x mankiet (22 cm - 42 cm),
- 4 x baterie alkaliczne AAA 1,5 V
- 1 x arkusz do notowania ciśnienia,
- 1 x torba.

## Działanie Microlife BP B3 AFIB, automatyczny ciśnieniomierz naramienny, 1 szt.

technologia AFIB- wykrywa migotanie przedsionków,  
technologia PAD- wykrywa arytmie,  
technologia MAM- możliwość wykonania uśrednionych lub pojedynczych pomiarów,  
oblicza średnią ze wszystkich oraz z 3 pomiarów,  
polecany przez Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego,  
charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru i rozpoznawaniem błędnych pomiarów,  
posiada duży czytelny wyświetlacz LCD, sygnalizuje zużycie baterii i funkcje automatycznego wyłączenia.

## Dawkowanie Microlife BP B3 AFIB, automatyczny ciśnieniomierz naramienny, 1 szt.

### Ciśnieniomierz BP B3 AFIB – instrukcja

Nałóż mankiet, pamiętając, aby ramię podczas pomiaru było wsparte, a mankiet znajdował się na wysokości serca.  
Wybierz tryb standardowy (pojedynczy pomiar) lub MAM (pomiar potrójny z uśrednionym wynikiem). Tryb MAM wybierzesz poprzez naciśnięcie przycisku MAM do czasu pojawienia się na ekranie symbolu MAM. Żeby przejść do trybu standardowego, ponownie naciśnij przycisk MAM, aż symbol MAM na ekranie zniknie.  
W celu rozpoczęcia pomiaru naciśnij na ciśnieniomierzu Microlife BP B3 AFIB przycisk ON/OFF.  
Mankiet wypełni się powietrzem automatycznie, a po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ciśnienie w mankiecie będzie stopniowo maleć.  
W czasie pomiaru na wyświetlaczu pojawi się migający symbol serca.  
Po zakończonym pomiarze na ekranie pojawi się wynik ciśnienia krwi (ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, tętno).  
Zdejmij mankiet i wyłącz aparat, naciskając przycisk ON/OFF. Ciśnieniomierz BP B3 AFIB po 1 minucie bezczynności wyłączy się automatycznie.

## Informacje dodatkowe Microlife BP B3 AFIB, automatyczny ciśnieniomierz naramienny, 1 szt.

Warunki pracy: 10-40oC/ 50-104oF. Maksymalna wilgotność względna 15-95%.  
Warunki przechowywania: -20- +55oC/ -4-+131oF. Maksymalna wilgotność względna 15-95%.  
Waga: 402g (z bateriami)  
Wymiary: 138 x 94,5 x 62,5 mm.  
Zakres pomiaru: 20-280 mmHg- ciśnienie krwi; 40-200 uderzeń na minutę- tętno.  
Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0-299 mmHg.  
Rozdzielczość: 1mmHg  
Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie  $\pm 3$ mmHg  
Dokładność pomiaru tętna:  $\pm 5\%$  wartości odczytu  
Źródło napięcia: 4 x 1,5V baterie alkaliczne rozmiar AA.  
Żywotność baterii: około 920 pomiarów (używając nowych pomiarów).  
**Gwarancja 5 lat.**  
Mankiet posiada 2 lata gwarancji.

## Galeria

