

Microlife MT 16C2, elektroniczny termometr owulacyjny, 1 szt.



Cena: 18,40 zł

Opis słownikowy

Marka	Microlife
Postać	termometr
Producent	CHDE
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Microlife MT 16C2, elektroniczny termometr owulacyjny, 1 szt.

Wyrób medyczny Microlife MT 16C2 to elektroniczny termometr do pomiaru temperatury ciała z 4 cyfrowym wyświetlaczem.

Skład Microlife MT 16C2, elektroniczny termometr owulacyjny, 1 szt.

Zawartość opakowania

W opakowaniu znajduje się termometr Microlife MT 16C2 oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

Wskazania Microlife MT 16C2, elektroniczny termometr owulacyjny, 1 szt.

Produkt przeznaczony jest do wykonywania pomiarów temperatury ciała, zarówno pod pachą, w jamie ustnej, jak i w odbycie.

Dawkowanie Microlife MT 16C2, elektroniczny termometr owulacyjny, 1 szt.

Pomiar pod pachą:

1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.
2. Pulsujący symbol °C oznacza, że termometr jest gotowy do pomiaru.
3. Umieść końcówkę z czujnikiem w dole pachowym. Zalecany czas pomiaru to 3-5 minut, bez względu na sygnał dźwiękowy.
4. Wynik odczytaj na wyświetlaczu.
5. Wyłącz urządzenie.

Pomiar w jamie ustnej:

1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.
2. Pulsujący symbol °C oznacza, że termometr jest gotowy do pomiaru.
3. Umieść końcówkę z czujnikiem pod językiem (z prawej lub lewej strony). Zamknij usta i spokojnie oddychaj przez nos. Zalecany czas pomiaru to 1 minuta, po upływie tego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
4. Wynik odczytaj na wyświetlaczu.
5. Wyłącz urządzenie.

Pomiar w odbycie

1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.
2. Pulsujący symbol °C oznacza, że termometr jest gotowy do pomiaru.
3. Umieść końcówkę z czujnikiem w odbycie na głębokość około 2-3 cm. Zalecany czas pomiaru to 1 minuta, po upływie tego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
4. Wynik odczytaj na wyświetlaczu.
5. Wyłącz urządzenie.

Czyścić zanurzając końcówkę pomiarową w 70% alkoholu izopropylowym na nie dłużej niż 24 godziny.

Przeciwwskazania Microlife MT 16C2, elektroniczny termometr owulacyjny, 1 szt.

Nie wyparzać termometru i nie umieszczać końcówki pomiarowej w gotującej wodzie.

Informacje dodatkowe Microlife MT 16C2, elektroniczny termometr owulacyjny, 1 szt.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Chronić przed wysokimi temperaturami, wstrząsami i upadkami.

Końcówkę pomiarową można myć w wodzie o temperaturze poniżej 60°C.

Zaleca się sprawdzanie w autoryzowanym laboratorium dokładności urządzenia co 2 lata.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru	32,00 - 42,99°C
Dokładność pomiaru	± 0,1°C w zakresie 34,00 - 42,00°C
Pamięć	Ostatni pomiar
Zasilanie	Bateria 1,5/1,55 V, LR 41
Gwarancja	2 lata od daty zakupu

Galeria

