

Microlife NEB 210, kompaktowy inhalator kompresorowy, 1 szt.



Cena: 128,72 zł

Opis słownikowy

Marka	Microlife
Postać	inhalator
Producent	CHDE
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Microlife NEB 210, kompaktowy inhalator kompresorowy, 1 szt.

Inhalator NEB 210 to inhalator kompresorowy przeznaczony do nebulizacji zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Przeznaczony jest do wytwarzania sprężonego powietrza do produkcji aerozolu w leczeniu chorób układu oddechowego. Produkt posiada funkcję regulacji tempa nebulizacji. Ponadto, odznacza się bardzo wysoką frakcją respirabilną – ilością leku docierającego do płuc i oskrzeli.

Skład Microlife NEB 210, kompaktowy inhalator kompresorowy, 1 szt.

Zawartość opakowania

Nebulizator, maski na twarz dla dorosłych i dzieci, ustnik, część na nos, 5 sztuk zapasowych filtrów, torba do przenoszenia.

Działanie Microlife NEB 210, kompaktowy inhalator kompresorowy, 1 szt.

Urządzenie jest kompaktowe i wygodne. Pozwala na szybkie i skuteczne wsparcie w leczeniu. Obsługiwane jest za pomocą jednego przycisku, dzięki czemu praca z inhalatorem jest niebywale prosta. Produkt może być używany przez całą rodzinę - bez względu na wiek. Posiada regulowany przepływ do indywidualnego leczenia. Nadaje się do najpopularniejszych roztworów do inhalacji.

Wskazania Microlife NEB 210, kompaktowy inhalator kompresorowy, 1 szt.

Urządzenie jest odpowiednie do zastosowania domowego. Może być stosowany przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Dawkowanie Microlife NEB 210, kompaktowy inhalator kompresorowy, 1 szt.

Skrócona instrukcja obsługi:

Zmontować zestaw do inhalacji. Należy zwrócić uwagę czy dostępne są wszystkie części.

Napełnić komorę środkiem inhalacyjnym, pilnując by nie został przekroczony znak maksymalnego napełnienia komory.

Połączyć zestaw inhalacyjny z przewodem powietrznym do kompresora i podłączyć wtyczkę do sieci (230V 50 Hz AC).

Aby uruchomić urządzenie, należy ustawić przełącznik ON / OFF w pozycji «I».

Zaleca się, aby w trakcie inhalacji siedzieć prosto i być zrelaksowanym. Nie należy leżeć podczas inhalacji. W razie pogorszenia samopoczucia należy natychmiast przerwać inhalację.

Po zakończeniu inhalacji, w czasie zalecanym przez lekarza, należy wyłączyć urządzenie. W tym celu powinno się ustawić przełącznik w pozycji «O» i odłączyć wtyczkę od zasilania.

Na koniec, zestaw inhalacyjny należy opróżnić z resztek leku a samo urządzenie wyczyścić.

Informacje dodatkowe Microlife NEB 210, kompaktowy inhalator kompresorowy, 1 szt.

Przed zastosowaniem produktu należy się zapoznać z instrukcją obsługi dołączoną do opakowania.

Specyfikacja

Model	NEB 210
Wymiary	160 x 161 x 90 mm
Waga	około 1200 g
Tempo nebulizacji	0,11 ml - 0,40 ml/min
Wielkość cząsteczek	2,08 µm (MMAD)
Fracja respirabilna (FPF%, 0.5 - 5 µm)	95.8%
Tryb pracy	30 min ON / 30 min OFF
Wydajność aerozolu	0,40 ml/min (NaCl 0.9%)
Maksymalny swobodny przepływ powietrza	15 l/min i
Operacyjny przepływ powietrza	5,31 l/min
Odgłos pracy	52 dBA

Galeria

