

Nexcare ColdHot HappyKids, okłady żelowe ciepło-zimno wielokrotnego użytku, 2 szt.

Cena: 58,29 zł



Opis słownikowy

Marka	Nexcare
Postać	kompres
Producent	3M
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Nexcare ColdHot HappyKids, okłady żelowe ciepło-zimno wielokrotnego użytku, 2 szt.

Wyrób medyczny Nextcare ColdHot Therapy Pack Happy Kids to okłady żelowe wielokrotnego użytku do stosowania na ciepło lub zimno.

Wyrób posiada żel w kolorze niebieskim i żółtym oraz kolorowe rysunki zwierząt, które umiłą użytkowanie najmłodszym pacjentom. Żel jest biodegradowalny w 99%, nietoksyczny i bezpieczny dla całej rodziny.

Skład Nexcare ColdHot HappyKids, okłady żelowe ciepło-zimno wielokrotnego użytku, 2 szt.

Zestaw zawiera 2 żelowe okłady o wymiarach 110 x 120 mm oraz pokrowce.

Działanie Nexcare ColdHot HappyKids, okłady żelowe ciepło-zimno wielokrotnego użytku, 2 szt.

Kompres żelowy stosowany na ciepło pomaga zmniejszyć ból towarzyszący skurczom mięśni, bóle miesiączkowe oraz ból wzrostowy u dzieci. Produkt może być także używany w formie termoforu. Działa także relaksująco i uspokajająco.

Kompres żelowy na zimno pomaga zmniejszyć obrzęk, stan zapalny oraz ból związany z urazami (stłuczenie, skręcenie, siniaki, guzy). Działa łagodząco na ból zębów, krwawienie z nosa, opuchliznę spowodowaną ukąszeniem przez owady, a także podczas gorączki.

Wskazania Nexcare ColdHot HappyKids, okłady żelowe ciepło-zimno wielokrotnego użytku, 2 szt.

Stosowanie na ciepło zalecane jest w trakcie bóli wzrostowych, bólu brzucha wywołanego napięciem mięśniowym oraz do ogrzewania dłoni.

Stosowanie na zimno zaleca się podczas bólu zębów, urazów (takich jak siniaki, skręcenia, stłuczenia, guzy), krwotoków z nosa, w trakcie gorączki oraz do zmniejszenia opuchlizny powstałej na skutek ukąszenia przez owady.

Dawkowanie Nexcare ColdHot HappyKids, okłady żelowe ciepło-zimno wielokrotnego użytku, 2 szt.

Stosowanie na ciepło:

1. Podgrzej kompres (KUCHENKA MIKROFALOWA: żelowy kompres połóż płasko w mikrofalówce, podgrzewaj 20 sekund przy użyciu mocy 640 W. GORĄCA WODA: zagotuj wodę i zdejmij ją z źródła ciepła. Zanurz kompres żelowy w wodzi na około 60 sekund).
2. Ostrożnie wyjmij kompres (z mikrofalówki lub gorącej wody) i ugniataj żel aby równomiernie rozprowadzić ciepło.
3. Włóż kompres do pokrowca.
4. Aplikuj na skórę białą włókninową stroną lub owić okład w ręcznik.
5. Przykładaj do bolącego miejsca, aż do momentu uczucia dyskomfortu.
6. Jeśli okład osiągnie temperaturę pokojową, w celu dalszego użytkowania należy go ponownie podgrzać.

Stosowanie na zimno:

1. Umieść kompres żelowy w lodówce lub zamrażarce na co najmniej 2 godziny.
2. Włóż kompres do pokrowca.
3. Aplikuj na skórę białą włókninową stroną lub owić okład w ręcznik.
4. Przykładaj okład do skóry przez 20 minut. Powtórne zastosowanie można przeprowadzić po odczekaniu kolejnych 20 minut.

Przeciwwskazania Nexcare ColdHot HappyKids, okłady żelowe ciepło-zimno wielokrotnego użytku, 2 szt.

Produkt tylko do użytku zewnętrznego.

Nie stosować na wrażliwą lub uszkodzoną skórę oraz u osób z podejrzeniem lub stwierdzonymi problemami z krążeniem.

Nie stosować okładu bezpośrednio na skórę: gorący okład może spowodować oparzenie, zimny - odmrożenia. Przed aplikacją zawsze należy założyć pokrowiec.

Nie należy podgrzewać okładów, które są złożone, zgięte lub zamrożone.

Nie podgrzewać w piekarniku ani na grillu.

Produkt nie jest przeznaczony do ciągłego podgrzewania - przegrzanie może spowodować uszkodzenie.

Jeśli moc kuchenki mikrofalowej jest nieznana należy ustawić najniższą możliwą moc (odmrażanie) i podgrzewać kompres w 20-sekundowych seriach.

Nie używać w przypadku uszkodzenia okładu, gdy żel stał się płynny lub w przypadku wycieku.

Nie siadaj na kompresie, nie wywieraj na niego nacisku, gdyż może pęknąć.

Informacje dodatkowe Nexcare ColdHot HappyKids, okłady żelowe ciepło-zimno wielokrotnego użytku, 2 szt.

Przechowuj w ciemnym, niedostępnym dla dzieci miejscu.

Czyścić tylko ręcznie przy użyciu łagodnych detergentów. Nie stosować alkoholu ani żadnych innych rozpuszczalników.