

Novama Pingo, elektroniczny aspirator do nosa, 1 szt.



Cena: 179,69 zł

Opis słownikowy

Marka	Novama
Postać	aspirator
Producent	Novamed
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Novama Pingo, elektroniczny aspirator do nosa, 1 szt.

Dla dzieci od 0. do 12. roku życia. 12 melodyjek. Bezpieczny i wygodny. Oczyszcza nos delikatnie i skutecznie. Posiada 3 letnią gwarancję.

Skład Novama Pingo, elektroniczny aspirator do nosa, 1 szt.

Zawartość opakowania
Aspirator Novama Pingo,
2 końcówki do nosa,
2 baterie typu AA
instrukcja obsługi.

Działanie Novama Pingo, elektroniczny aspirator do nosa, 1 szt.

Aspirator kataru Novama Pingo wytwarza siłę ssącą, dzięki czemu można odciągnąć wydzielinę z nosa dziecka. Aspirator sprawdza się dobrze w warunkach domowych, na wyjazdach i wycieczkach. Urządzenie jest wyposażone w 2 końcówki: mniejszą, dla małych dzieci lub do stosowania przy rzadkiej wydzielinie i większą, polecaną dla starszych dzieci lub do odciągania gęstej wydzieliny. Aspirator jest wygodny i łatwy w obsłudze. Ergonomiczny kształt ułatwia trzymanie go w prawidłowej pozycji, dzięki temu sposób

aplikacji jest intuicyjny i bezpieczny.
Jest lekki i cichy. Można z niego korzystać nawet gdy dziecko śpi.
Posiada 2 tryby pracy - przerywany lub ciągły.
Posiada 12 melodyjek dla zwiększenia komfortu dziecka. Jest jednocześnie możliwość wyłączenia funkcji np. w nocy.
Łatwy w czyszczeniu - głowicę oraz jej części można myć pod bieżącą wodą oraz dezynfekować wrzątkiem.
Nie ma konieczności używania akcesoriów jednorazowych.
Zasilany bateriami.

Wskazania Novama Pingo, elektroniczny aspirator do nosa, 1 szt.

Aspirator do nosa Novama Pingo jest przeznaczony do oczyszczania nosa z kataru, dzieci od 0. do 12. roku życia.

Dawkowanie Novama Pingo, elektroniczny aspirator do nosa, 1 szt.

Przed zastosowaniem aparatu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użycia dołączoną do opakowania.

Skrócona instrukcja obsługi urządzenia:

1. Dobierz odpowiednią końcówkę do kształtu i rozmiaru nozdrzy dziecka oraz rodzaju wydzieliny.
2. Upewnij się, że końcówka została prawidłowo zamontowana.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby rozpocząć odsysanie wydzieliny.
4. Utrzymuj głowę dziecka w pionie i wprowadź końcówkę do jednego z nozdrzy. Poczekaj, aż aspirator wciągnie wydzielinę. W razie konieczności powtórz czynność w drugim nozdrzu.
5. Zwolnij przycisk, aby zakończyć odsysanie.
6. Po każdym użyciu zaleca się szybkie oczyszczenie końcówki, wraz z głowicą i zbiorniczkiem.

Przeciwwskazania Novama Pingo, elektroniczny aspirator do nosa, 1 szt.

Urządzenie tylko do użytku domowego. W przypadku schorzeń nosa należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować w przypadku pacjentów z następującymi przeciwwskazaniami: krwawienie z nosa, poważne obrażenia twarzy, szyi, głowy, zaburzenia krzepnięcia krwi.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Informacje dodatkowe Novama Pingo, elektroniczny aspirator do nosa, 1 szt.

Specyfikacja techniczna:

Moc ss?ca	450 mmHg (60 kPa)
Ci?nienie akustyczne	75-80 dB
Materia? ko?cówki ss?cej	silikon
Silnik	3V pr?d sta?y
Zasilanie	2 baterie alkaliczne 1,5V AA
Czas pracy na bateriach	ok. 90 minut w zale?no?ci od rodzaju i marki u?ytych baterii

Wymiary	ok. 98,5 × 45,3 × 143 mm
Waga	ok. 146 g bez baterii