

OB ProComfort Mini, tampony higieniczne, 16 szt.

Cena: 22,79 zł



Opis słownikowy

Marka	O.b.
Postać	tampony
Producent	Johnson & Johnson
Rejestracja	Środki higieniczne

Opis produktu

Informacje podstawowe OB ProComfort Mini, tampony higieniczne, 16 szt.

Nowe o.b.® ProComfort™ dla wyjątkowego komfortu i niezawodnej ochrony. Dzięki technologii Dynamic Fit™ z 3D expansion dostosowuje się do Twojego ciała i efektywnie wychwytuje płyn kierując go poprzez splecione rowki do wnętrza i w górę tamponu. Z otoczką Silk Touch™ dla łatwej aplikacji. Odpowiedni na dni o skąym krwawieniu. Opakowanie wytworzone z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł; papier z recyklingu (min. 75%).

Skład OB ProComfort Mini, tampony higieniczne, 16 szt.

Zawartość opakowania

16 szt. tamponów o.b. ProComfort Mini.

Wskazania OB ProComfort Mini, tampony higieniczne, 16 szt.

Dla osób, które nie używały jeszcze tamponów lub w końcowych dniach menstruacji, przy umiarkowanym krwawieniu.

Dawkowanie OB ProComfort Mini, tampony higieniczne, 16 szt.

Umyj ręce zanim zaaplikujesz tampon.

Przekręć osłonkę tamponu zgodnie ze strzałkami, a następnie usuń jej dolną część od strony sznureczka.

Rozwiń sznureczek, pociągnij go mocno, aby go rozprostować, po czym włóż w zagłębienie tamponu czubek palca wskazującego.

Zdejmij osłonkę z górnej części tamponu. Osłonka pozostanie w jednej części po jej zdjęciu.

Wolną dłonią delikatnie rozchyl wargi sromowe i delikatnie wsuń tampon do pochwy po łuku (ku tyłowi i górze) tak daleko, jak to możliwe. Jeśli czujesz opór, delikatnie zmień kierunek wprowadzania tamponu.
Jeśli tampon jest nadal wyczuwalny, wprowadź go trochę głębiej. Prawidłowo zaaplikowany tampon nie powinien być wyczuwalny.
Po aplikacji tamponu sznureczek powinien być cały czas widoczny.
Aby usunąć tampon, wystarczy pociągnąć za sznureczek.
Ponownie umyj ręce.

Informacje dodatkowe OB ProComfort Mini, tampony higieniczne, 16 szt.

Pamiętaj o regularnej wymianie tamponów co 4-8 godzin.
Przed zaaplikowaniem nowego tamponu, pamiętaj o usunięciu poprzedniego.
Myj ręce przed i po wymianie tamponu.
Wybierz tampon, który najlepiej odpowiada intensywności Twojego krwawienia i zawsze używaj tamponu o najmniejszej chłonności odpowiadającej Twoim potrzebom.
Jeśli używasz tamponu w nocy, zaaplikuj go przed snem i usuń rano, zaraz po wstaniu z łóżka.

Jeżeli podczas miesiączki poczujesz się źle i pojawi się gorączka, wymioty, biegunka, ból głowy, gardła, zawroty głowy, utrata przytomności, bóle mięśniowe, zmiany skórne przypominające oparzenie słoneczne (nie muszą wystąpić wszystkie te objawy), usuń tampon i skontaktuj się z lekarzem lub udaj się do szpitala. Poinformuj lekarza, że masz miesiączkę i, że obawiasz się TSS.
Jeśli już chorowałaś na TSS, powinnaś skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem tamponów.