

## OneTouch Select Plus, paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 50 sztuk



Cena: 38,35 zł

### Opis słownikowy

Marka	OneTouch
Postać	test
Producent	Lifescan
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

## Informacje podstawowe OneTouch Select Plus, paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 50 sztuk

Paski testowe do glukometru OneTouch Select Plus, 50 szt.

Wyrób medyczny. Wyrób do diagnostyki in vitro.

Paski testowe do Paski testowe do glukometru OneTouch Select Plus służą do samodzielnego pomiaru poziomu glukozy we krwi włośniczkowej (kapilarnej) pobranej z opuszki palca. Przeznaczone są do użytku wyłącznie z glukometrem OneTouch Select Plus. Pozwalają na uzyskanie wyniku w ciągu 5 sekund.

## Skład OneTouch Select Plus, paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 50 sztuk

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych

## Wskazania OneTouch Select Plus, paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 50 sztuk

Paski testowe OneTouch Select Plus przeznaczone są do przeprowadzania samodzielnych pomiarów stężenia glukozy w krwi kapilarnej, za pomocą glukometru OneTouch Select Plus.

## Dawkowanie OneTouch Select Plus, paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 50 sztuk

Zanim zaczniesz używać pasków testowych OneTouch Select Plus do badania poziomu glukozy we krwi, zapoznaj się z instrukcją obsługi glukometru i ulotkami dołączonymi do zestawu startowego.

W skrócie:

Umyj dokładnie ręce wodą z mydłem i osusz je czystym ręcznikiem.  
Wykonaj nakłucie i poczekaj, aż uformuje się odpowiednia kropla krwi.  
Do paska testowego OneTouch Select Plus potrzeba co najmniej 1.0 µl krwi.  
Trzymając palec prosto, zbliż krawędź paska testowego do kropli krwi.  
Delikatnie przyłóż kanalik do powierzchni kropli krwi.  
Poczekaj, aż okno kontrolne całkowicie wypełni się krwią. Kanalik powinien zassać całą kroplę krwi, która wypełni całe okno kontrolne.  
Po 5 sekundach możesz odczytać wynik.  
Ostrożnie usuń zużyty lancet i pasek testowy.

## Przeciwwskazania OneTouch Select Plus, paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 50 sztuk

Przechowuj paski testowe w chłodnym i suchym miejscu o temperaturze od 5°C do 30°C.  
Nie wykonuj pomiaru, jeśli zauważysz wilgoć na glukometrze. Przenieś glukometr i paski testowe do chłodnego, suchego miejsca i poczekaj, aż glukometr wyschnie.  
Nie otwieraj opakowania z paskami testowymi, dopóki nie jesteś gotowy/a, aby wyjąć pasek i wykonać pomiar. Użyj paska testowego natychmiast po wyjęciu go z fiolki, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności.  
Szczelnie zamknij fiolkę od razu po wyjęciu paska, aby uniknąć zanieczyszczenia lub uszkodzenia.  
Niewykorzystane paski testowe przechowuj tylko w oryginalnym opakowaniu.  
Po wykonaniu pomiaru nie wkładaj zużytych pasków testowych do fiolki.  
Nie używaj ponownie paska testowego, który wcześniej miał kontakt z krwią lub roztworem kontrolnym. Paski testowe są przeznaczone do jednorazowego użytku.  
Nie przeprowadzaj pomiaru za pomocą zgiętego lub uszkodzonego paska.  
Czystymi, suchymi rękami można dotykać całej powierzchni paska. Nie zginaj, nie przecinaj i w żaden sposób nie modyfikuj paska testowego.  
Otwierając opakowanie pasków testowych, zwróć uwagę na datę ważności na etykiecie. Data ważności pasków testowych jest nadrukowana na opakowaniu i na fiolce z paskami testowymi.