

Opti-Free Express Multi-purpose, wielofunkcyjny dezynfekcyjny płyn do soczewek, 355 ml



Cena: 48,59 zł

Opis słownikowy

Marka	Opti-Free
Postać	płyn
Producent	Alcon
Rejestracja	Preparat dezynfekcyjny
Substancja czynna	Kwas borny

Opis produktu

Informacje podstawowe Opti-Free Express Multi-purpose, wielofunkcyjny dezynfekcyjny płyn do soczewek, 355 ml

Opti-Free Express to jałowy wielofunkcyjny płyn dezynfekujący do pielęgnacji wszystkich miękkich oraz silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych. Płyn służy do spłukiwania, a także przechowywania soczewek. Czyści rozluźniając i eliminując osady białkowe oraz inne złoże i zanieczyszczenia z soczewek podczas dezynfekcji jak i podczas ich przechowywania. Dodatkowo produkt Opti-Free Express dezynfekuje i pozwala na przechowywanie soczewek przez okres do 30 dni po dezynfekcji.

Skład Opti-Free Express Multi-purpose, wielofunkcyjny dezynfekcyjny płyn do soczewek, 355 ml

Jałowy, zbuforowany izotoniczny wodny roztwór zawierający chlorek sodu, sorbitol, wersenian disodowy, kwas borny, aminometylopropanol, cytrynian sodu, Tetric 1304, Polyquad (polikwaternium-1) 0,001%, Aldox (mirstamidopropylodimetyloamina) 0.0005%

Wskazania Opti-Free Express Multi-purpose, wielofunkcyjny dezynfekcyjny płyn do soczewek, 355 ml

Dezynfekcja, czyszczenie, spłukiwanie, nawilżanie oraz przechowywanie wszystkich miękkich soczewek kontaktowych, włącznie z

soczewkami silikonowo-hydrożelowymi.

Dawkowanie Opti-Free Express Multi-purpose, wielofunkcyjny dezynfekcyjny płyn do soczewek, 355 ml

Dokładnie umyj i wytrzyj ręce.

Płynem Opti-Free Express dokładnie zmocz każdą stronę soczewki.

Potrzyj każdą ze stron soczewki przez około 10 sekund, po czym dokładnie je optukaj ciągłym strumieniem płynu Opti-Free Replenish.

Napełnij świeżym płynem Opti-Free Express pojemnik na soczewki.

Soczewki przechowuj w zamkniętym pojemniku na soczewki przez noc lub co najmniej przez 6 godzin.

W przypadku gdy na soczewkach kontaktowych pozostały jakieś zanieczyszczenia, należy je optukać płynem Opti-Free Express przed ich nałożeniem.

Soczewki mogą być przechowywane w nieotwieranym pojemniku z płynem do 30 dni.

Informacje dodatkowe Opti-Free Express Multi-purpose, wielofunkcyjny dezynfekcyjny płyn do soczewek, 355 ml

Nie używać w przypadku uszkodzenia czy zniszczenia opakowania oraz uszkodzenia lub braku banderoli zabezpieczającej.

Nie stosować do dezynfekcji cieplnej.

Należy zapoznać się z załączoną ulotką informacyjną.

Zamknąć po użyciu.

Zużyć przed końcem daty ważności podanej na opakowaniu.

Płyn zużyć w terminie do 6 miesięcy od otwarcia butelki, pozostałość usunąć.

Unikać nadmiernego nagrzania.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Ostrzeżenia

Jeżeli w trakcie noszenia soczewek kontaktowych wystąpi łagodne podrażnienie, dyskomfort lub niewyraźne widzenie, należy podać 1 lub 2 krople Opti-Free Express do oka, a następnie dwu-trzykrotnie mrugnąć okiem.

Płyn można stosować tak często jak wymaga tego potrzeba.

Zawsze należy stosować się do zaleceń okulisty oraz ulotek informacyjnych dołączonych do środków pielęgnacyjnych, jak również soczewek i pojemników. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu, nadmiernego łzawienia, zmian w widzeniu, zaczerwienieniu oka, należy natychmiastowo zdjąć soczewkę i skontaktować się z okulistą.

Zawsze należy używać świeżego płynu Opti-Free Express. Nigdy nie należy używać go ponownie do pojemników na soczewki.

Należy używać wyłącznie pojemników na soczewki Alcon.

W celu uniknięcia zainfekowania płynu nie należy dotykać końcówką butelki do żadnych powierzchni.