

Optiplast, plastry okulistyczny junior, dekorowane, 62 x 50 mm, 10 szt.



Cena: 24,69 pln

Opis słownikowy

Producent VISCOPLAST

Opis produktu

Opis

Opis

Plastry Okulistyczne Opti-plast Junior.
Z kolorowym nadrukiem.

Działanie

- Plastry na podłożu włókninowym z miękkim opatrunkiem umożliwiającym swobodne ruchy gałki ocznej; plaster może być noszony pod okularami.
- Hipoalergiczne, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i powietrza.

Sposób użycia wyrobu medycznego

1. Skórę wokół oka umyć i osuszyć
Uwaga! W przypadku skóry suchej można posmarować okolicę oka kremem nawilżającym, szybko wchłaniającym się i dopiero po 30-60 min. zastosować plaster.
2. Usunąć papier zabezpieczający plaster.

3. Lekko przymknąć oko uważając, aby nie napinać mięśni. Nie zaciskać oka
4. Położyć opatrunek centralnie na oko, węższą stroną do nosa i rozpocząć przyklejanie od strony nosa w kierunku brwi. Nie naciągać plastra ani skóry wokół oka.
5. Po umiejscowieniu plastra lekko docisnąć palcem część przylepną wokół oka.
6. Zaleca się zmieniać plaster po jego zabrudzeniu lub samoczynnym odklejeniu się.
7. Na noc plaster należy zdejmować
8. Delikatnie odklejać plaster od strony nosa w kierunku ucha, jednocześnie przytrzymując skórę w wewnętrznej okolicy oka (bliżej nosa)
9. Po usunięciu plastra należy przez chwilę przytrzymać palcami świeżo odsłoniętą skórę
10. Okolice wokół oka, po umyciu i osuszeniu, posmarować maścią z witaminą A lub kremem nawilżającym.