

Pani Teresa Basis, temblak kończyny górnej rozmiar S, 1 szt.



Cena: 51,19 zł

Opis słownikowy

Marka	Pani Teresa
Producent	Pani Teresa Medica
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Pani Teresa Basis, temblak kończyny górnej rozmiar S, 1 szt.

Do stosowania podczas leczenia urazów, zwichnięć i złamań kończyny górnej, wymagających potrzymania i unieruchomienia. Temblak może być stosowany jako opatrunek podtrzymujący opatrunek gipsowy, podczas rehabilitacji po zdjęciu gipsu lub innego usztywnienia, a także jako doraźne podtrzymanie kończyny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego.

Skład Pani Teresa Basis, temblak kończyny górnej rozmiar S, 1 szt.

Poliester 85% polipropylen 8% bawełna 4% poliamid 3%.

Dawkowanie Pani Teresa Basis, temblak kończyny górnej rozmiar S, 1 szt.

Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania: Przedramię umieścić w kieszeni temblaka, kciuk zawiesić w przeznaczonym do tego „oczku” w wewnętrznej części temblaka. Taśmę przełożyć przez zdrowe ramię dopasowując odpowiednio jej długość za pomocą rzepów, a wzmocnienie ochronne na taśmie układając na szyi.

Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania: Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

Informacje dodatkowe Pani Teresa Basis, temblak kończyny górnej rozmiar S, 1 szt.

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.