

Pani Teresa, opaska elastyczna stawu nadgarstkowego krótka rozmiar L, 2 szt.



Cena: 22,59 zł

Opis słownikowy

Marka	Pani Teresa
Postać	opaska
Producent	SIGVARIS
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Pani Teresa, opaska elastyczna stawu nadgarstkowego krótka rozmiar L, 2 szt.

PANI TERESA © Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego, krótka – to produkt ortopedyczny wzmacniający i stabilizujący staw. Wysokość opaski to 6 cm.

Wskazania Pani Teresa, opaska elastyczna stawu nadgarstkowego krótka rozmiar L, 2 szt.

wzmacnia aparat więzadłowy nadgarstka
łagodzi ból i obrzęk
zapobiega nadwyrężeniom i nadciągnięciom stawu nadgarstka

Dawkowanie Pani Teresa, opaska elastyczna stawu nadgarstkowego krótka rozmiar L, 2 szt.

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu ręki w nadgarstku, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakazania:

W opakowaniu znajdują się dwie opaski.

Opaski zapinać na wysokości stawów nadgarstkowych. Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Informacje dodatkowe Pani Teresa, opaska elastyczna stawu nadgarstkowego krótka rozmiar L, 2 szt.

Występuje w rozmiarach S-XL

Rozmiar (cm)	S	M	L	
Obwód ręki w nadgarstku	14-18	19-22	23-25	

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.
- Prążyć w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania węgny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!