

Pani Teresa Soft, przeciwżylakowe podkolanówki uciskowe czarne rozmiar 3, 1 para



Cena: 37,79 zł

Opis słownikowy

Marka	Pani Teresa
Producent	SIGVARIS
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Pani Teresa Soft, przeciwżylakowe podkolanówki uciskowe czarne rozmiar 3, 1 para

Pani Teresa Soft Podkolanówki przeciwżylakowe czarne w rozmiarze 3, przeznaczonym dla kobiet o wzroście do 175 cm (więcej w tabeli rozmiarów), które odczuwają ból i skurcze łydek lub zauważyły pojawiające się na nogach „pajęczki”. Do stosowania również w przypadku ciężkości i obrzęków kończyn dolnych.

Skład Pani Teresa Soft, przeciwżylakowe podkolanówki uciskowe czarne rozmiar 3, 1 para

Elastan 55%, Poliamid 45%

Działanie Pani Teresa Soft, przeciwżylakowe podkolanówki uciskowe czarne rozmiar 3, 1 para

Profesjonalna linia profilaktycznych produktów przeciwżylakowych Pani Teresa Soft, stymulując krążenie krwi, zapewnia nogom uczucie lekkości.

Podkolanówki wykorzystują zmienny, stopniowany ucisk (10 – 14 mmHg), najsilniejszy w kostce i stopniowo słabnący w kierunku uda, aby przynieść ulgę nawet najbardziej zmęczonym nogom.

Wskazania Pani Teresa Soft, przeciwżylakowe podkolanówki uciskowe czarne rozmiar 3, 1 para

Podkolanówki przeznaczone są do stosowania przy zaburzeniach funkcyjnych takich jak uczucie ciężkości i zmęczenia nóg, przy obecnej chorobie żylakowej.

Dawkowanie Pani Teresa Soft, przeciwżylakowe podkolanówki uciskowe czarne rozmiar 3, 1 para

Przy zakładaniu i zdejmowaniu należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić delikatnej struktury wyrobu np. paznokciem, zegarkiem lub biżuterią. Zaleca się stosowanie gumowych rękawic. Również nieodpowiednia pielęgnacja stóp oraz uszkodzone wnętrze obuwia mogą doprowadzić do powstania przetarć i uszkodzenia wyrobu.

Zakładanie:

Wyrób należy zakładać tuż po wstaniu, gdy obrzęk nóg jest najmniejszy. Nie należy ciągnąć wyrobu do góry, lecz delikatnymi ruchami, najlepiej używając gumowych rękawic, płasko ułożonymi dłońmi równomiernie rozciągać materiał na nodze.

Zdejmowanie:

Należy chwycić wyrób za górną krawędź i delikatnie ściągnąć w kierunku pięt.

Prawidłowe ułożenie:

Podkolanówka jest prawidłowo założona, gdy górna krawędź mankietu znajduje się na wysokości 2 palców poniżej dołu podkolanowego.

Informacje dodatkowe Pani Teresa Soft, przeciwżylakowe podkolanówki uciskowe czarne rozmiar 3, 1 para

Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.
Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Zawartość netto: 2 sztuki.