

# Pani Teresa, temblak kończyny górnej rozmiar L, 1 szt. PT0204



Cena: 54,09 zł

## Opis słownikowy

Marka	Pani Teresa
Postać	temblak
Producent	SIGVARIS
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Pani Teresa, temblak kończyny górnej rozmiar L, 1 szt. PT0204

Temblak kończyny górnej marki Pani Teresa to wyrób medyczny, który przeznaczony jest do stosowania w celu wspomaganie procesów leczenia i rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami. Produkt cechuje się miękką osłoną na wysokości szyi, dzięki czemu przeciwdziała jej otarciom. Szeroki zakres regulacji paska mocującego pozwala dopasować temblak do kształtu ciała.

Rozmiar: L.

### Skład Pani Teresa, temblak kończyny górnej rozmiar L, 1 szt. PT0204

Poliester 85%, polipropylen 8%, bawełna 4%, poliamid 3%.

### Wskazania Pani Teresa, temblak kończyny górnej rozmiar L, 1 szt. PT0204

jako opatrunek podtrzymujący opatrunek gipsowy  
po zdjęciu opatrunku gipsowego – podczas rehabilitacji  
jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

## Dawkowanie Pani Teresa, temblak kończyny górnej rozmiar L, 1 szt. PT0204

### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

### Sposób zakładania:

Przedramię umieścić w kieszeni temblaka, kciuk zawiesić w przeznaczonym do tego „oczku” w wewnętrznej części temblaka. Taśmę przełożyć przez zdrowe ramię dopasowując odpowiednio jej długość za pomocą rzepów, a wzmocnienie ochronne na taśmie układając na szyi.

## Informacje dodatkowe Pani Teresa, temblak kończyny górnej rozmiar L, 1 szt. PT0204

### Przepis prania:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

### Tabela rozmiarów:

Rozmiar ramienia (cm)	XXS	XS	S	M	L	XL
Długość przedramienia	15-16	17-20	21-24	25-30	31-34	35-37