

Pasocare Med, plaster opatrunkowy jałowy 10 x 10 cm, 1 szt.

Cena: 1,00 zł

Opis słownikowy

Marka	Pasocare
Postać	plastry
Producent	Paso
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Pasocare Med, plaster opatrunkowy jałowy 10 x 10 cm, 1 szt.

Pasocare MED Plaster opatrunkowy jałowy.

Rozmiar: 10 cm x 10 cm.

Skład Pasocare Med, plaster opatrunkowy jałowy 10 x 10 cm, 1 szt.

włóknina, wiskoza, poliester, klej hipoalergiczny.

Wskazania Pasocare Med, plaster opatrunkowy jałowy 10 x 10 cm, 1 szt.

Przeznaczony do absorbowania krwi lub wysięków z rany i jej ochrony przed infekcjami oraz przed rozprzestrzenianiem się zakażenia.

Dawkowanie Pasocare Med, plaster opatrunkowy jałowy 10 x 10 cm, 1 szt.

Oczyścić i zdezynfekować ranę. Otworzyć opakowanie i wyjąć plaster. Zdjąć folię ochronną ze strony przylepnej plastra. Zaaplikować plaster tak, aby opatrunek zakrywał w całości uszkodzony obszar skóry. Używać do czasu zagojenia rany, stosując wymianę plastra na nowy po przesiąknięciu opatrunku lub według zaleceń lekarza, jednak nie później niż po upływie 24h od chwili założenia.

Informacje dodatkowe Pasocare Med, plaster opatrunkowy jałowy 10 x 10 cm, 1 szt.

Przed użyciem sprawdzić stan opakowania – nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Stosować niezwłocznie po otwarciu. Wyrób do użytku jednorazowe – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem! Nie sterylizować powtórnie. Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia.