

## Peha-soft nitrile fino, niejałowe rękawice nitrylowe niepodudrowane niebieskie rozmiar S, 10 szt.



Cena: 6,49 zł

### Opis słownikowy

Marka	Peha-soft
Postać	rękawice
Producent	Hartmann
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Peha-soft nitrile fino, niejałowe rękawice nitrylowe niepodudrowane niebieskie rozmiar S, 10 szt.

Diagnostyczne rękawice nitrylowe Peha-soft® nitrile fino S to bezlateksowe, jednorazowe rękawice wykonane z bardzo miękkiego materiału w niebieskim kolorze. Są szczególnie polecane osobom ze skłonnością do alergii na lateks lub u których występują reakcje nadwrażliwości na puder rękawic.

Niebieskie rękawice nitrylowe Peha-soft® nitrile fino S Hartmann® zapewniają ochronę w kontakcie z patogenami oraz ze związkami chemicznymi, m.in. środkami dezynfekcyjnymi i cytostatykami. Są bezpieczne także w kontakcie z żywnością.

#### Skład Peha-soft nitrile fino, niejałowe rękawice nitrylowe niepodudrowane niebieskie rozmiar S, 10 szt.

Nitryl 100%.

#### Działanie Peha-soft nitrile fino, niejałowe rękawice nitrylowe niepodudrowane niebieskie rozmiar S, 10 szt.

Miękka rękawica diagnostyczna i ochronna wykonana z syntetycznej gumy nitylowej Peha-soft® nitrile fino jest bezpudrowa i uniwersalna – pasuje na obie dłonie. Rękawicę charakteryzuje dobra wrażliwość dotykowa i wysoki komfort noszenia. Syntetyczna guma nitylowa wewnątrz została pokryta powłoką polimerową ułatwiającą nakładanie, a teksturowana powierzchnia palców zapewnia optymalną chwytność. Rozmiar S jest odpowiedni do mniejszych dłoni.

Małe opakowanie zawiera 10 rękawic nitylowych.

#### Cechy produktu

wyjątkowo miękki materiał,  
bardzo elastyczny i odporny na rozdarcia,  
doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni,  
bez pudru,  
nie zawierają lateksu,  
uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie,  
teksturowana powierzchnia palców,  
wysoka wrażliwość dotykowa,  
specjalna powłoka polimerowa wewnątrz,  
kolor: niebieski,  
rozmiar: S

### Wskazania Peha-soft nitrile fino, niejałowe rękawice nitylowe niepudrowane niebieskie rozmiar S, 10 szt.

Niesterylny środek ochrony osobistej przeznaczony do minimalizowania zagrożenia podczas badań lekarskich i diagnostycznych, czynności terapeutycznych oraz prac z materiałem septycznym, w trakcie których nie występuje ryzyko uszkodzenia skóry. Ochrona dłoni przy pracy ze związkami chemicznymi, w tym środkami dezynfekcyjnymi i cytostatykami. Odpowiednie do zabezpieczenia dłoni w kontakcie z żywnością.

### Dawkowanie Peha-soft nitrile fino, niejałowe rękawice nitylowe niepudrowane niebieskie rozmiar S, 10 szt.

Przed założeniem sprawdzić, czy rękawica nie jest uszkodzona lub zabrudzona.  
Nakładać na dokładnie osuszone ręce.  
Wyciągnąć jedną rękawicę unikając dotykania opakowania i nałożyć na dłoń trzymając za górną część mankietu  
Czynność powtórzyć z drugą ręką.  
Po użyciu ściągnąć poprzez zrolowanie mankietu do wnętrza.  
Wyrzucić postępując zgodnie z wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami

### Informacje dodatkowe Peha-soft nitrile fino, niejałowe rękawice nitylowe niepudrowane niebieskie rozmiar S, 10 szt.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 5-25°C.  
Chronić przed oddziaływaniem światła słonecznego i fluorescencyjnego.  
Trzymać z dala od źródeł ciepła.  
Wyrób medyczny jednorazowego użytku – należy używać min. 1 pary rękawic do jednego pacjenta i jednej procedury.  
W przypadku mechanicznego uszkodzenia rękawicy należy ją niezwłocznie wymienić na nową.

Po użyciu utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Jakość produktu nie jest zagwarantowana w przypadku uszkodzenia opakowania.

### **Dodatkowe informacje**

Wyrób Medyczny Klasa I  
Środek Ochrony Osobistej w Kategorii III.  
Zgodny z wymaganiami norm EN 455, EN 374.

### **Zawartość opakowania**

10 sztuk

### **Producent**

Paul Hartmann AG  
Paul Hartmann Straße 12  
89522 Heidenheim, Germany

### **Dystrybutor**

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.  
ul. Żeromskiego 17  
95-200 Pabianice

### Galeria

---

