

# Pempa AS 100, komora inhalacyjna dla niemowląt 0-18 msc, 1 szt.



Cena: 44,79 zł

## Opis słownikowy

Marka	Pempa
Postać	inhalator
Producent	Pempa Jerzy Żukowski
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Pempa AS 100, komora inhalacyjna dla niemowląt 0-18 msc, 1 szt.

Komora inhalacyjna Pempa® AS 100 ułatwia efektywne stosowanie leków w postaci aerozolu (MDI). Wielkość maseczki i samej komory została dostosowana do potrzeb przeprowadzania inhalacji u niemowląt od urodzenia do 18 miesiąca życia.

### Działanie Pempa AS 100, komora inhalacyjna dla niemowląt 0-18 msc, 1 szt.

Komora zwiększa ilość dostarczanego leku. Pomaga wprowadzić do płuc, co przekłada się bezpośrednio na skuteczność zastosowanej terapii. Komora wspomagająca inhalację sprawia, że więcej substancji czynnych dociera do płuc, a mniej pozostaje w jamie ustnej i gardle. Przez to efektywność inhalacji jest zwiększona, a ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w tych częściach ciała jest mniejsze. Jednokierunkowa zastawka o wysokiej skuteczności działania, ułatwiająca wykonywanie wdechów i wydechów.

Uniwersalny łącznik umożliwia korzystanie ze wszystkich powszechnie przypisywanych na receptę inhalatorów MDI. Co ważne antystatyczna komora zapobiega osadzeniu się cząsteczek leku na jej ściankach. Komora inhalacyjna z maską dla dzieci 0-18 miesięcy Pempa® AS 100 jest przy tym łatwa w użyciu i czyszczeniu.

#### Cechy produktu

wyposażona w miękką, silikonową maskę,  
rozmiar odpowiedni dla dzieci 0-18 miesięcy,  
antystatyczna, przezroczysta komora,

zwiększa efektywność inhalacji – dostarczenie leku do płuc,  
zmniejsza osadzanie się leku w jamie ustnej i gardle,  
nie wymaga koordynacji wdechu z podaniem aerozolu,  
łatwa w obsłudze i czyszczeniu.

kolor żółty,  
antystatyczna,  
bez BPA.

## Wskazania Pempa AS 100, komora inhalacyjna dla niemowląt 0-18 msc, 1 szt.

Komora inhalacyjna z maską do podawania do płuc odmierzonej dawki w postaci aerozolu zgodnie z zaleceniami lekarza. Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od urodzenia do 18 miesiąca życia.

## Dawkowanie Pempa AS 100, komora inhalacyjna dla niemowląt 0-18 msc, 1 szt.

Dokładnie sprawdź komorę i usuń z niej wszystkie ciała obce.  
Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub brakujące części, natychmiast wymień produkt na nowy.  
Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia.  
Zdejmij zatyczki z inhalatora oraz komory maski.  
Wstrząśnij inhalatorem zgodnie z jego instrukcją użytkowania.  
Włóż inhalator do tylnej ściany komory.  
Założ dziecku maskę na twarz i upewnij się, że jest szczelna.  
Dziecko powinno wykonać wydech.  
Na początku powolnego wdechu jednokrotnie naciśnij inhalator.  
Przytrzymaj maskę. Dziecko powinno wykonać 5-6 wdechów i wydechów przez komorę.  
Podawaj 1 dawkę na raz.  
Przestrzegaj instrukcji dołączonej do inhalatora dotyczącej czasu, który musi upłynąć przed powtórzeniem zabiegu.  
Pamiętaj o regularnym myciu i czyszczeniu komory.

## Przeciwwskazania Pempa AS 100, komora inhalacyjna dla niemowląt 0-18 msc, 1 szt.

Nie używaj produktu wspólnie z innymi osobami.

## Informacje dodatkowe Pempa AS 100, komora inhalacyjna dla niemowląt 0-18 msc, 1 szt.

### Gwarancja

2 lata

### Ostrzeżenia

Urządzenie nie jest zabawką – nie zostawiaj w pobliżu dzieci bez opieki.  
Może dojść do trwałego uszkodzenia produktu w przypadku gotowania, sterylizacji albo czyszczenia w temperaturze przekraczającej 70°C.  
Jeżeli słyszysz świszczący dźwięk w czasie oddychania, lek jest wdychany zbyt szybko.