

Pempa NEB 100, inhalator tłokowy, 1 szt.



Cena: 102,98 zł

Opis słownikowy

Marka	Pempa
Postać	inhalator
Producent	Pempa Jerzy Żukowski
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Pempa NEB 100, inhalator tłokowy, 1 szt.

Inhalator tłokowy NEB100 Pempa® to uniwersalne i niezawodne urządzenie do zabiegów inhalacji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Model charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami, wysokiej jakości kompresorem do pracy ciągłej oraz gotowym zestawem do nebulizacji, który spełni wymagania całej rodziny.

Skład Pempa NEB 100, inhalator tłokowy, 1 szt.

Zawartość opakowania

- 1 x inhalator,
- 1 x maska dla dzieci,
- 1 x maska dla dorosłych,
- 1 x przewód powietrza,
- 1 x ustnik, instrukcja obsługi

Działanie Pempa NEB 100, inhalator tłokowy, 1 szt.

Inhalator tłokowy, czyli pneumatyczny, to urządzenie stosowane do podawania leków oraz innych substancji wspomagających leczenie drogą nebulizacji. Jest to proces polegający na wytworzeniu mgiełki z leczniczymi składnikami, którą się wdycha i dzięki temu przedostaje się ona do dróg oddechowych. Celem inhalacji jest dostarczenie substancji leczniczej bezpośrednio do miejsca docelowego

jej działania, czyli do dróg oddechowych.

Inhalator Pempa® NEB100 to doskonałe rozwiązanie dla osób borykających się z problemami układu oddechowego, w których została zalecona inhalacja. Urządzenie zaprojektowane zostało tak, aby umożliwić szybką i skuteczną nebulizację leków, co pozwala złagodzić objawy takie jak kaszel, duszność i uczucie zatkanego nosa, zwłaszcza w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych. Możliwość regulacji tempa inhalacji zapewnia szybkie i wydajne rozpylanie substancji zaleconych w terapii wziewnej.

Urządzenie jest proste w obsłudze i posiada intuicyjny panel kontrolny. Ponadto jest łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, co wpływa na utrzymanie higieny podczas korzystania z inhalatora.

Inhalator NEB100 to kompaktowy i lekki sprzęt, który można zabrać ze sobą w podróż lub używać w domu. Pempa® NEB100 to szybkie i skuteczne leczenie infekcji górnych dróg oddechowych, w tym kataru w przebiegu przeziębienia.

Cechy produktu

prosty w obsłudze,
intuicyjny panel kontrolny,
dobre parametry,
praca ciągła,
wysokiej jakości kompresor,
regulacja tempa inhalacji,
uniwersalny: dla dzieci i dorosłych,
akcesoria można myć i dezynfekować.

Wskazania Pempa NEB 100, inhalator tłokowy, 1 szt.

Terapia aerozolowa w chorobach układu oddechowego.
Inhalator odpowiedni dla dzieci i dorosłych.

Dawkowanie Pempa NEB 100, inhalator tłokowy, 1 szt.

Napełnij dolną część nebulizatora lekiem przepisany przez lekarza, a następnie delikatnie przykręć górną część, aby zamknąć nebulizator.

Przymocuj końcówkę przewodu powietrznego do podstawy nebulizatora.

Drugą część przewodu podłącz do urządzenia.

Przymocuj odpowiednią końcówkę do inhalacji do górnej części nebulizatora.

Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.

Włącz przycisk ON, aby rozpocząć inhalację.

Po zakończeniu inhalacji wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci elektrycznej.

Po każdym użyciu dokładnie umyj nebulizator i końcówkę do inhalacji.

Informacje dodatkowe Pempa NEB 100, inhalator tłokowy, 1 szt.

Specyfikacja techniczna

wielkość cząsteczek: 2,08 µm,
frakcja respirabilna: 95,8%,
tempo nebulizacji >0,4 ml/min.,
cicha praca <52 dB.

Gwarancja

3 lata Door to Door

Ważne wskazówki

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do opakowania.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Galeria

