

PiC FullWash, lewatywa tradycyjna 2l , 1 szt.



Cena: 39,09 zł

Opis słownikowy

Marka	PiC
Producent	Sirowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe PiC FullWash, lewatywa tradycyjna 2l , 1 szt.

Zestaw do irygacji jelit lub pochwy PiC Solution FullWash

Wyrób medyczny,

PiC Solution FullWash to zestaw, dzięki któremu można przeprowadzać lewatywę lub irygację pochwy. Składa się z miękkiego, zawieszanego pojemnika na roztwór do irygacji o pojemności 2 litrów, wężyka i dwóch końcówek: doodbytniczej i dopochwowej. Wyrób nie zawiera lateksu.

Skład PiC FullWash, lewatywa tradycyjna 2l , 1 szt.

Zawartość opakowania

Zasobnik PVC o pojemności 2 litrów, z podziałką
Kaniula doodbytnicza i dopochwowa do irygacji

Wskazania PiC FullWash, lewatywa tradycyjna 2l , 1 szt.

Lewatywa PiC Solution FullWash może być stosowana w przypadkach:

Oczyszczenia jelit, w trakcie diety,

Leczeniu zaparć, wobec nieskuteczności innych metod,
Przygotowaniu do zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych,
Przygotowaniu przed porodem.

Dawkowanie PiC FullWash, lewatywa tradycyjna 2l , 1 szt.

Otworzyć zasobnik na płyn,
Przymocować wężyk,
Do wężyka przymocować kocówkę (kaniulę) do irygacji jelitowej lub dopochwowej,
Napełnić zasobnik odpowiednim płynem do irygacji,
Odkręcić zaworek przy wężyku i przeprowadzić płukanie,
Po skończonym zabiegu należy dokładnie umyć wszystkie elementy zestawu.

Informacje dodatkowe PiC FullWash, lewatywa tradycyjna 2l , 1 szt.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed światłem.