

## Plast.SALVEQUICK Finger Mix 18 szt. 1op.



Cena: 16,19 zł

### Opis słownikowy

Marka	Salvequick
Postać	plastry
Producent	Cederroth

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Plast.SALVEQUICK Finger Mix 18 szt. 1op.

Dłonie są jedną z części ciała najbardziej narażonych na skaleczenia i otarcia. Jednocześnie, ze względu na dużą ruchomość, rany na rękach i palcach są dość trudne do opatrzenia. Salvequick Finger Mix to zestaw plastrów dostosowanych kształtem i rozmiarem do opatrywania skaleczeń na dłoniach.

### Działanie Plast.SALVEQUICK Finger Mix 18 szt. 1op.

- odporne na wodę i brud
- pozwalają skórze oddychać
- warstwa wierzchnia wykonana z unikalnego mikroperforowanego materiału, zapewniającego wyjątkową przewiewność opatrunku
- wysokochłonny opatrunek
- elastyczne
- dyskretne (plaster w kolorze skóry)
- dobrze przylegające do skóry, nie przesuwające się

### Dawkowanie Plast.SALVEQUICK Finger Mix 18 szt. 1op.

Instrukcja stosowania:

1. Skóra powinna być całkowicie czysta i sucha
2. Usuń zadrukowany papier ochronny

3. Oddziel jedną połowę papieru ochronnego wzdłuż perforowanej linii.
4. Usuń ochronny papier z plastra i przyklej na środek rany
5. Trzymaj plaster do momentu, aż zacznie naturalnie odpadać. Uchwyć jeden koniec i pociągnij ostrożnie wzdłuż skóry usuwając plaster

## Przeciwwskazania Plast.SALVEQUICK Finger Mix 18 szt. 1 op.

- Nie stosuj na zakażone rany.
- Chorzy na cukrzycę powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem plastra.
- Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
- Plaster może być używany tylko przez 1 osobę.
- Ponowne użycie produktu zwiększa ryzyko zakażenia.